

Mes rūpinamės Jūsų sveikata

GRAINA
Sprendimai medicinai



Dr. Schumacher

Produktų asortimentas

Dezinfekcija, higiena ir priežiūra



Kokybė ir inovacijos higienos srityje

Ilgiau nei 35 metus trunkantis siekis apsaugoti darbuotojus ir pacientus nuo infekcijų ir užkratų



Saugumą užtikrinanti patirtis

Kompanija Dr. Schumacher GmbH buvo įkurta 1978 metais Melsungen, 30 km į pietus nuo Kassel. Turint omenyje jos įkūrėjo Dr. Henning Schumacher profesinį stažą, kompanija turi daugiau kaip 30 metų patirtį higienos ir dezinfekcijos srityje.

Dr. Schumacher pradėjo chemiko karjerą Hamburge, gerai žinomo dezinfekavimo priemonės gamintojo mokslinių tyrimų ir plėtros skyriuje. Po kelių sėkmingo darbo metų, jis tęsė savo karjerą didelėje Vokietijos medicinos įrenginių korporacijoje, įsikūrusioje Hesse šiaurinėje dalyje.

Likdamas ištikimas savo pagrindiniam tikslui – apsaugoti darbuotojus ir pacientus – jis pradėjo savo verslą. Tai buvo vienintelis būdas realizuoti savo novatoriškas gamybos idėjas taip, kaip jis norėjo, t.y., sutrumpinant sprendimų priėmimo procesus,

ir kartu supaprastinant biurokratinę struktūrą.

90-ųjų metų pabaigoje Dr. Schumacher perdavė kompaniją savo sūnums Dierk (chemikui) ir Jens (farmacininkui, MBA), kurie tęsė tėvo sukurtą kompanijos filosofiją. Inovatyvių produktų kūrimas abiem sūnums išliko įmonės strategijos pagrindu. Šiandien Dr. Schumacher GmbH kompanija yra viena iš pirmaujančių higienos, dezinfekavimo ir slaugos produktų kūrėjų ir gamintojų Europoje. Savo buveinėje Malsfeld, Hesse ši šeima priklausanči kompanija kuria ir tiekia novatoriškus ir unikalius produktus.

Šiuo metu Dr. Schumacher GmbH kompanijoje dirba 850 darbuotojų aštuoniose šalyse ir tai yra vienintelis dezinfekavimo priemonių gamintojas, turintis nuosavą servetėlių gamybos liniją.





Taigi, kompanija tapo pripažintu tarptautiniu profesionalu, pagaminančiu apie 5,700 tonų odos, rankų, instrumentų ir paviršių dezinfekavimo priemonių. Produktai yra eksportuojami į daugiau kaip 68 šalis ir pelnė Dr. Schumacher GmbH kompanijai tarptautinį pripažinimą.

Intensyvūs moksliniai tyrimai ir plėtra


Nuolatiniai moksliniai tyrimai ir plėtra leido mums tapti vienu svarbiausių instrumentų dezinfekavimo priemonių be aldehido gamintojų Vokietijoje. 80-ųjų metų pradžioje mes pristatėme vieną iš pirmųjų itin veiksmingų paviršių dezinfekavimo priemonių be aldehidų ir fenolių. Netrukus po to sekė pirmoji instrumentų dezinfekavimo priemonė be aldehidų ir fenolių, kuri ypač veiksminga prieš tuberkuliozės bakteriją ir atitinka DGHM reglamentas (DGHM = Vokietijos higienos ir mikrobiologijos asociacija).


Sekančios kartos instrumentų dezinfekavimo priemonėmis mes aiškiai parodėme, kad įmanoma sumažinti veiklių medžiagų kiekį, vis dar išlaikant trumpą ekspozicijos laiką, ir, nenaudojant aldehidų, tilpti į sugriežtintų VAH/DGHM reglamentų rėmus.

Nuosekli kokybės politika

Mūsų tikslas – pasiūlyti produktus, gaminamus pagal naujausias technologijas ir standartus, siekiant,

kad jie būtų saugūs ir patogūs vartotojams. Būdami vaistų, medicinos prietaisų, biocidų ir kosmetinių produktų gamintojai, mes dirbame pagal GMP reikalavimus, ISO 9001/EN 13485 ir kosmetikos GMP reglamentų nuostatas. Mūsų gamybos procesai patikrinti ir sertifikuoti žinomų gamintojų.

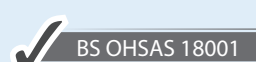

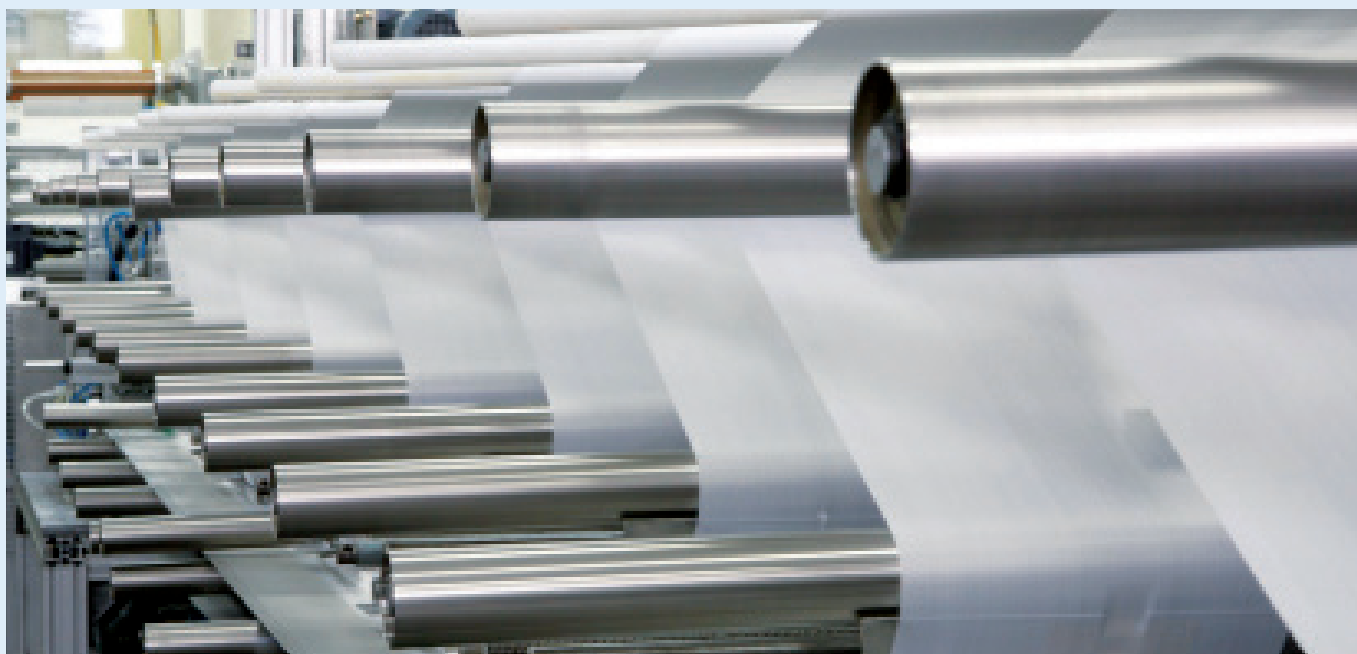

Desotex - Premium

Aukščiausios kokybės neaustinės medžiagos servetėlės medicinos ir slaugos sektoriams

Desotex – aukščiausios kokybės neaustinė medžiaga

Kompanija Dr. Schumacher GmbH, kuri specializuojasi higienos, dezinfekcijos ir slaugos produktų gamybos srityje, yra viena iš pirmaujančių įmonių Europoje, turinti nuosavą servetėlių gamybos liniją.

Unikali dezinfekantų gamybos kompetencijos ir modernių aukščiausios technologinės kokybės audinių sinergija nustato standartą higienos rinkoje ir iki šiol yra unikali.

Medicinos ir slaugos sektoriams skirtų produktų gamybai mes naudojame aukščiausios kokybės DESOTEX Premium neaustines medžiagas, kurių kokybė buvo patvirtinta laboratoriniais tyrimais. Mes galime garantuoti optimalų mūsų produktų veikliųjų medžiagų išskyrimą. Todėl DESOTEX produktų teikiamas saugumas ir apsauga darbuotojams, pacientams ir gyventojams yra itin aukšto

lygio.

Mūsų DESOTEX mokslinių tyrimų ir plėtros padalinyje buvo išbandytos skirtingos audinio ir dezinfekavimo medžiagų kombinacijos. Aukščiausios klasės audinio DESOTEX dezinfekavimo servetėlių efektyvumas buvo testuojamas pagal Vokietijos higienos ir mikrobiologijos asociacijos (DGHM) standartinius metodus, pasitelkiant nepriklausomas akredituotas laboratorijas ir naudojant įvairias dezinfekcijos medžiagas. DESOTEX audinio dezinfekavimo servetėlės išskiria beveik 100% dezinfekanto veikliųjų medžiagų. Mūsų įdiegtoje sistemoje dezinfekcinio audinio rulonai išlieka mikrobiologiškai stabilūs nuo 28 dienų iki 6 savaičių. Ir tai yra patvirtinta ekspertų.



Ekspertų patarimai ir paslaugos

Mes siūlome daugiau nei novatoriškus produktus – savo veikloje nuolat remiamės ekspertų patarimais ir paslaugomis, susijusiomis su higiena ir dezinfekcija.

Todėl džiaugiamės galėdami Jums kompetentingai patarti, kaip naudoti mūsų produktus ir laikytis higienos reikalavimų.

Mes visada turime paruoštą aktualiausią įstatymuose numatytą produkto dokumentaciją. Ją bet kada galite rasti mūsų interneto svetainėje www.schumacher-online.com.

Mūsų kompetentinga, specialiai apmokyta ko-

manda visada pasiruošusi apmokyti arba padėti techniniais ir higienos klausimais.

Glaudus bendradarbiavimas su mokslinių tyrimų skyriumi ir mokslo bei teisės padaliniais yra pagrindinis mūsų įmonės struktūros privalumas, leidžiantis greitai ir lanksčiai reaguoti į Jūsų poreikius.



Pilnas produktų asortimentas

Dezinfekcija, higiena ir priežiūra

Rankos ir oda psl. 08-31

dezinfekcija

Rankų ir odos dezinfekcija 08-13

Odos dezinfekcija 14-15

sanitarija

Antimikrobinis valymas ir
higieninis rankų plovimas

plovimas

Rankų ir odos plovimas 20-23

Odos valymas ir odos priežiūros servetėlės 24-25

priežiūra

Odos apsauga ir rankų priežiūra 26-29

Odos ir kūno priežiūra 30-31

Instrumentai psl. 32-45

Dezinfekavimas/valymas rankiniu būdu 32-41

Automatizuotas apdorojimas 42-44

Instrumentų priežiūra 45

Paviršiai psl. 46-65

Koncentratai paviršiaus dezinfekcijai 46-53

Greita dezinfekcija 54-61

Dezinfekcijos servetėlės/sistemos 62-65

Odontologija psl. 66-69

Odontologijos instrumentų dezinfekavimas 66-69

Pagalbinės priemonės psl. 70-75

Sieniniai dozatoriai ir dozavimo priemonės 70-75

Rankos ir oda

Dezinfekcija

10-13

Rankų ir odos dezinfekcija

14-15

Odos dezinfekcija

Rankos ir oda

Dezinfekcija

Rankos ir oda

Dezinfekcija

Medicinos įstaigose patogeniniai mikrobai dažniausiai perduodami personalo rankomis. Dėl šios priežasties, siekiant išvengti infekcijų perdavimo, būtinas dažnas ir reguliarus rankų dezinfekavimas.

Siekdami greito ir saugaus dezinfekcijos efektyvumo, mes skiriame ypatingą dėmesį rankų bei odos dezinfekavimo priemonių tolerancijai bei poveikiui odai.

Todėl savo produktuose nenaudojame ilgai nei besikaupiančių veikliųjų medžiagų ir į produktų sudėtį įtraukiame odą tausojančius komponentus, padedančius išlaikyti sveiką odą kasdieninės veiklos metu.

	Taikymo sritis			Veikliosios medžiagos			Efektyvumas			Produkto savybės		
	hygieninė rankų dezinfekcija pagal DGHM / VAH / EN	chirurginė rankų dezinfekcija pagal DGHM / VAH / EN	odos dezinfekcija	etanolis	1-propanolis	2-propanolis	aktyvus prieš virusus su apvalkalu, įsk. HCV, HBV, HIV	Noro virusas	virusidinis	drėkinamas	be kvapiųjų medžiagų	bespalvis
ASEPTOMAN® bekvapis	✓	✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓
ASEPTOMAN®	✓	✓				✓	✓	✓		✓		✓
ASEPTOMAN® Gel	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓
ASEPTOMAN® PLUS	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓
DESCODERM	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓
DESCODERM pads			✓			✓	✓				✓	✓
ASEPTODERM® coloured			✓			✓	✓					
ASEPTODERM®			✓			✓	✓					✓

VAH/DGHM

ÖGHMP



ASEPTOMAN[®] bekvapis alkoholinis rankų dezinfekantas

- pasižymintis baktericidinėmis savybėmis, įsk. MRSA, TB bakterijas, mieles
- efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu, Rota ir Noro virusus
- turintis odą minkštinančių priedų

ASEPTOMAN[®] bekvapis yra įtrinamas į odą alkoholinis rankų dezinfekantas. ASEPTOMAN[®] bekvapis dezinfekanto sudėtyje yra drėkinančios medžiagos lanolino, kuris užtikrina švelnios odos pojūtį. Kadangi ASEPTOMAN[®] bekvapis greitai džiūsta ir turi drėkinamųjų savybių, jis atitinka geros rankų higienos reikalavimus. Tai ypač malonus odai produktas, tinkantis žmonėms, turintiems jautrią odą.


bekvapis

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
150 ml kišeninis butelis	20	00-403OP-0015EXD
500 ml butelis	20	00-403OP-005EXD
1 L butelis	12	00-403OP-010EXD

Antimikrobinės savybės	Naudojimo būdas
baktericidinis įsk. MRSA, mielicidinis pagal VAH/DGHM/EN 1040/EN 1275/EN 13727/ EN 13624	higieninė rankų dezinfekcija pagal VAH/DGHM/EN 1500 konc. 30 sek.
tuberkulocidinis pagal EN 14348	chirurginė rankų dezinfekcija pagal VAH/DGHM/EN 12791 konc. 1.5 min.
efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu įsk. Hepatito B virusą/ŽIV/ Hepatito C virusą pagal EN 14476	
efektyvus prieš Rota ir Noro virusus (MNV) pagal EN 14476	
Veikliųjų medžiagų 100 g 63.14 g (70% V/V) 2-propanolio	

Saugiai naudokite dezinfekavimo priemones. Prieš pradėdami naudoti visada perskaitykite etiketę ir produkto informaciją.

Higieninė rankų dezinfekcija pagal EN 1500

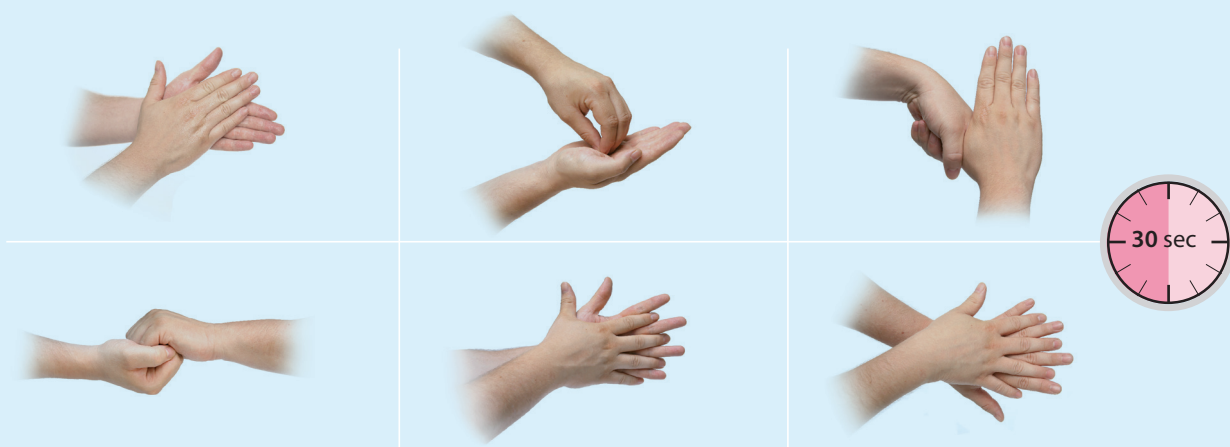

- Nedidelį kiekį rankų dezinfekanto užpilkite ant sausų delnų.
- Rankos turi būti sudrėkintos visos procedūros metu. Jei reikia, užpilkite dezinfekanto papildomai.
- Higieninę rankų dezinfekciją atlikite mažiausiai 30 sekundžių.
- Nedėvėkite žiedų ar laikrodžių, pirštų nagai turi būti trumpi ir nelakuoti.
- Papildomai rankos plaunamos su vandeniu ir muilu tik tuo atveju, jei ant rankų išlieka matomi nešvarumai.

ASEPTOMAN[®] alkoholinis rankų dezinfekantas

- pasižymintis baktericidinėmis savybėmis įsk. MRSA, TB bakterijas, mieles
- efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu, Rota ir Noro virusus
- turintis odą minkštinančių priedų

ASEPTOMAN[®] yra įtrinamas į odą alkoholinis rankų dezinfekantas. ASEPTOMAN[®] dezinfekanto sudėtyje yra drėkinančios medžiagos lanolino, kuris užtikrina švelnios odos pojūtį. Dėl sudėtyje esančių kvapiųjų medžiagų ASEPTOMAN[®] maloniai kvepia, greitai džiūsta ir turi drėkinamųjų savybių. Todėl jis atitinka geros rankų higienos reikalavimus.



VAH/DGHH

RKIA

ÖGHMP

Antimikrobinės savybės	Naudojimo būdas
baktericidinis įsk. MRSA, mielicidinis pagal VAH/DGHH/EN 1040/EN 1275/EN 13727/ EN 13624	higieninė rankų dezinfekcija pagal VAH/DGHH/EN 1500 konc. 30 sek.
tuberkulocidinis pagal EN 14348	chirurginė rankų dezinfekcija pagal VAH/DGHH/EN 12791 konc. 1.5 min.
efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu įsk. Hepatito B virusą/ŽIV/ Hepatito C virusą pagal EN 14476	
efektyvus prieš Rota ir Noro virusus (MNV) pagal EN 14476	
Veikliųjų medžiagų 100 g 63.14 g (70% V/V) 2-propanolio	

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
150 ml kišeninis butelis	20	00-403-0015EX-10
500 ml butelis	20	00-403-005EX-10
1 L butelis	12	00-403-010EXP-10
5 L bakelis	3	00-403-050EX-10

Saugiai naudokite dezinfekavimo priemones. Prieš pradėdami naudoti visada

Higieninės rankų dezinfekcijos procedūra

Rankų dezinfekavimas yra būtinas, kai jos yra užterštos potencialiai patogeniškais bakterijomis arba yra tikimybė, kad jos užterštos:

1. prieš ir po kontakto su pacientu
2. prieš ir po bet kokio kontakto su žaizdomis
3. prieš aseptines procedūras
4. nusimovus apsaugines pirštines
5. po kontakto su potencialiai infekuotais objektais ir medžiagomis, tokiomis kaip kraujas ar kiti kūno skysčiai

Rankas dezinfekuoti reikia ir išėjus iš patalpos, kurioje yra pacientas, nes išlieka tikimybė, kad rankos galėjo būti užterštos, liečiant šalia paciento esančius paviršius.



VAH/DGHH

ÖGHMP

Inaktyvuoja
Noro virusą
per 15 sek.*



ASEPTOMAN® GEL

alkoholinis gelis rankų dezinfekcijai

- virusidinis pagal EN 14476
- ypač malonus odai
- turintis odą saugančių drėkinančių komponentų

Į odą įtrinamas alkoholinis gelis rankų dezinfekcijai. Tikslus dozavimas ir patogesnis naudojimas, dėl nelašančios gelio konsistencijos. ASEPTOMAN® GEL sudėtyje nėra ilgai nei besikaupiančių odą dirginančių ar jautrumą didinančių veikliųjų medžiagų. Suderinamas su visais plovimo losjonais. Be aldehidų, fenolių ir ketvirtinių amonio junginių

GELIS

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
150 ml kišeninis butelis	20	00-409-0015EXP
500 ml butelis	20	00-409-005EXP
1 L butelis	12	00-409-010EXP

Antimikrobinės savybės

baktericidinis įsk. MRSA, mielicidinis pagal VAH/DGHH/EN 13624/EN 13727

tuberkulocidinis pagal EN 14348

virusidinis pagal EN 14476 įsk. Polio/Adeno/ Noro virusus (MNV)

Naudojimo būdas

higieninė rankų dezinfekcija pagal VAH/DGHH/EN 1500 konc. 30 sek.

chirurginė rankų dezinfekcija pagal VAH/DGHH/EN 12791 konc. 1.5 min.

Norovirus (MNV) pagal EN 14476 konc. 15 sek.*

* Higieninei rankų dezinfekcijai turi būti išlaikytas 30 sekundžių kontaktinis laikas.

Veikliųjų medžiagų 100 g Etanolio 80,8 g (85% V/V)

Saugiai naudokite dezinfekavimo priemones. Prieš pradėdami naudoti visada perskaitykite etiketę ir produkto informaciją.

VAH/DGHH

ÖGHMP



ASEPTOMAN® PLUS

alkoholinis rankų dezinfekantas

- efektyvus prieš Noro virusus per 15 sek.*
- turintis odą saugančių drėkinančių komponentų
- virusidinis pagal EN 14476

Virusidinis alkoholinis į odą įtrinamas rankų dezinfekantas. ASEPTOMAN® PLUS yra ypač švelnus odai. Produkto sudėtis apima platų veikimo spektrą kartu su puikiomis odą tausojančiomis savybėmis. Efektyvus prieš Noro virusus.

* Higieninei rankų dezinfekcijai turi būti išlaikytas 30 sekundžių kontaktinis laikas.

virusidinis

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
150 ml kišeninis butelis	20	00-408-0015
500 ml butelis	20	00-408-005
1 L butelis	12	00-408-010EXP
5 L bakelis	3	00-408-050

Antimikrobinės savybės

baktericidinis įsk. MRSA, mielicidinis pagal VAH/DGHH/EN 13624/EN 13727

tuberkulocidinis pagal EN 14348

virusidinis pagal EN 14476 įsk. Polio / Adeno / Noro virus (MNV)

Naudojimo būdas

higieninė rankų dezinfekcija pagal VAH/DGHH/EN 1500 konc. 30 sek.

chirurginė rankų dezinfekcija pagal VAH/DGHH/EN 12791 konc. 1.5 min.

Veikliųjų medžiagų 100 g 80 g (85% V/V) etanolio, 0.1 g benzalkonio chlorido

Saugiai naudokite dezinfekavimo priemones. Prieš pradėdami naudoti visada perskaitykite etiketę ir produkto informaciją.

DESCODERM

alkoholinis rankų ir odos dezinfekantas

VAH/DGHH

ÖGHMP

RKI A

- rekomenduojamas alergiškiems arba turintiems jautrią odą asmenims
- sudėtyje nėra potencialiai alergiją sukeliančių ingredientų
- sporų filtravimas

Alkoholinis, bekvapis į odą ir rankas įtrinamas dezinfekantas. DESCODERM sudėtyje nėra ilgai besikaupiančių veikliųjų medžiagų ar kitų priedų, kurie gali dirginti ar jautrinti odą. Suderinamas su visais plovimo losjonais. Be aldehidų, fenolių ir ketvirtinių amonio junginių. Sporų filtravimas.



Antimikrobinės savybės	Naudojimo būdas
baktericidinis įsk. MRSA, mielicidinis pagal VAH/DGHH	higieninė rankų dezinfekcija pagal VAH/DGHH/EN 1500 konc. 30 sek.
tuberkulocidinis	chirurginė rankų dezinfekcija pagal VAH/DGHH/EN 12791 konc. 1.5 min.
efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu įsk. Hepatito B virusą/ŽIV/Hepatito C virusą	odos dezinfekcija prieš operacijas, periferinių kraujagyslių punkcijas: konc. 15 sek.
efektyvus prieš visus virusus be apvalkalo taip pat Rota – ir Noro virusus (MNV) pagal EN 14476	prieš operacijas, sąnarių, kūno ertmių, tuščiavidurių organų punkcijas:
	odos plotams su nedideliu poodiniu riebaliniu liaukų sluoksniu konc. 1 min.
	odos plotams su dideliu poodiniu riebaliniu liaukų sluoksniu konc. 10 min.
Veikliųjų medžiagų 100 g 63.1 g (70% V/V) 2-propanolio	

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
150 ml kišeninis butelis	20	00-401-0015EX
250 ml butelis su purkštuvu	30	00-401-0025EX
500 ml butelis	20	00-401-005EX
1 L butelis	12	00-401-010EXP
5 L bakelis	3	00-401-050EX

Saugiai naudokite dezinfekavimo priemones. Prieš pradėdami naudoti visada perskaitykite etiketę ir produkto informaciją.

DESCODERM pads

alkoholinės dezinfekcijos servetėlės

CE 0482

- mediciniinių prietaisų dezinfekavimui
- patogi kiekvienos servetėlės pakuotė
- dermatologų patvirtintas odos toleravimas

Paruoštos naudoti dezinfekavimo servetėlės medicinos prietaisų ir sveikos odos dezinfekavimui. Su DESCODERM pads sudrėkinti paviršiai išdžiūsta be jokių dėmių. Dermatologiškai patvirtintas suderinamumas su oda, todėl produktas rekomenduojamas alergiškiems ir turintiems jautrią odą asmenims



Antimikrobinės savybės	Naudojimo būdas
baktericidinis įsk. MRSA, mielicidinis pagal VAH/DGHH/EN 13624/EN 13727	medicinos prietaisų paviršiaus, sveikos odos dezinfekavimas 1 min.
efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu įsk. Hepatito B virusą/ŽIV/Hepatito C virusą	
Veikliųjų medžiagų 100 g 63.1 g (70% V/V) 2-propanolio	

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
100 pavienių paketėlių	1	00-401-T100

Saugiai naudokite dezinfekavimo priemones. Prieš pradėdami naudoti visada perskaitykite etiketę ir produkto informaciją.

VAH/DGHM



ASEPTODERM® coloured

spalvotas alkoholinis odų dezinfekantas

- spalvotas tirpalas – pritaikytas odų dezinfekcijai prieš operacijas
- itin švelnus odai

Paruoštas naudoti alkoholinis odų dezinfekantas. ASEPTODERM® coloured dezinfekantas yra raudonos spalvos, kad būtų matomas jau dezinfekuotas plotas. Pagrindinė jo paskirtis - dezinfekuoti odą prieš ar po operacijų. Bet, ASEPTODERM® coloured gali būti naudojamas ir odų dezinfekcijai prieš injekcijas, incizijas, punkcijas, kraujo paėmimus, kateterio įdėjimus, nedideles chirurgines intervencijas ir nedidelių atsitiktinių traumų atvejais. Švelnus odai, sudėtyje nėra ilgai besikaupiančių veikliųjų medžiagų. Be aldehidų, fenolių ir ketvirtinių amonio junginių. Sporų filtravimas

spalvotas

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
250 ml butelis su purkštuvu	20	00-502-0025EXP-20
1 L butelis	10	00-502-010EX-10
5 L butelis	3	00-502-050EX-10

Antimikrobinės savybės

baktericidinis įsk. MRSA, mielicidinis pagal VAH/DGHM
tuberkulocidinis
efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu įsk. Hepatito B virusą/ŽIV/ Hepatito C virusą

Naudojimo būdas

odų dezinfekcija prieš operacijas, periferinių kraujagyslių punkcijas: konc. 15 sek.
odų dezinfekcija prieš operacijas, sąnarių, kūno ertmių, kitų organų punkcijas
odų plotams su nedideliu poodiniu riebalinių liaukų sluoksniu konc. 1 min.
Odos plotams su dideliu poodiniu riebalinių liaukų sluoksniu konc. 3 min.

Veikliųjų medžiagų 100 g 63.14 g (70% V/V) 2-propanolio

Saugiai naudokite dezinfekavimo priemones. Prieš pradėdami naudoti visada perskaitykite etiketę ir produkto informaciją.

Dezinfekcijos proceso tobulinimo priemonės

Rankų dezinfekcija yra svarbiausias rankų higienos etapas, apsaugantis pacientus nuo mikrobus, kurie gali būti perduoti nuo medicinos personalo rankų. Patirtis rodo, kad rankų higiena neatliekama taip dažnai kaip būtina; Šio reiškinio priežastys - dezinfekavimo įrenginių trūkumas, laiko trūkumas ir (tariama) odos netolerancija naudojamiems produktams. Netinkama rankų dezinfekcija sudaro sąlygas mikrobus sukeliama ligų perdavimui pacientams ir hospitalinių infekcijų atsiradimui. Todėl labai svarbu tobulinti rankų dezinfekcijos procesus gydymo įstaigose.

Tai apima šias priemones:

- Dezinfekantų dozatoriai turi būti lengvai prieinami
- Pasirūpinti, kad dezinfekavimo priemonės nekenktų odai
- Nuolat mokyti darbuotojus
- Struktūrizuoti darbo procesus
- Vietose, kuriose nėra įrengtų fiksuotų dezinfekantų dozatorių, darbuotojai turi būti aprūpinti kišeninio dydžio dezinfekantų buteliukais

ASEPTODERM®

alkoholinis odos dezinfekantas

VAH/DGHM

- labai švelnus odai
- trumpas ekspozicijos laikas
- sporų filtravimas

Paruoštas naudoti alkoholinis odos dezinfekantas užpurškimui ant odos arba jos valymui. ASEPTODERM® gali būti naudojamas odos dezinfekcijai prieš injekcijas, incizijas, punkcijas, kraujo paėmimą, kateterio įdėjimą, nedideles chirurgines intervencijas ir nedidelių atsitiktinių traumų atvejais. Taip pat tinka dezinfekuoti odą prieš ar po operacijų. Sudėtyje nėra ilgai nei besikaupiančių veikliųjų medžiagų, kurios gali dirginti ar įjautrinti odą. Labai švelnus odai. Be aldehydų, fenolių ir ketvirtinių amonio junginių. Sporų filtravimas



Antimikrobinės savybės	Naudojimo būdas
baktericidinis įsk. MRSA, mielicidinis pagal VAH/DGHM	odos dezinfekcija prieš operacijas, periferinių kraujagyslių punkcijas: konc. 15 sek.
tuberkulocidinis	odos dezinfekcija prieš operacijas, sąnarių, kūno ertmių, kitų organų punkcijas
efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu įsk. Hepatito B virusą/ŽIV/ Hepatito C virusą	odos plotams su nedideliu poodiniu riebalinių liaukų sluoksniu konc. 1 min.
	odos plotams su dideliu poodiniu riebalinių liaukų sluoksniu konc. 3 min.
Veikliųjų medžiagų 100 g 63.14 g (70% V/V) 2-propanolio	

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
250 ml butelis su purkštuvu	20	00-501-0025EXP-20
500 ml butelis	20	00-501-005EX-10
1 L butelis	12	00-501-010EXP
5 L bakelis	3	00-501-050EX-10

Saugiai naudokite dezinfekavimo priemones. Prieš pradėdami naudoti visada perskaitykite etiketę ir produkto informaciją.

Skirtingų odos plotų dezinfekavimas

Ne visi odos plotai vienodai reaguoja į dezinfekavimo priemones.

odos plotams su dideliu poodiniu riebalinių liaukų sluoksniu, kad dezinfekavimo priemonė pasiektų pilną dezinfekavimo efektyvumą, reikalingas ilgesnis ekspozicijos laikas.

odos plotams su nedideliu poodiniu riebalinių liaukų sluoksniu, priklausomai nuo atliekamos medicininės intervencijos, ekspozicijai prireikia nuo 15 sekundžių iki 1 minutės laiko, kai tuo tarpu odos plotai su dideliu poodiniu riebalinių liaukų sluoksniu turi būti laikomi sudrėkinti dezinfekavimo priemone nuo 3 iki 10 minučių.

- odos plotams su dideliu poodiniu riebalinių liaukų sluoksniu



Rankos ir oda

Sanitarija

18-19

Antimikrobinis valymas

Rankos ir oda

Antimikrobinis valymas

Rankos ir oda

Antimikrobinis valymas

Daugiafunkciniai atsparūs patogenai (ligų sukėlėjai) kelia rimtą pavojų sveikatos priežiūros sistemai. Šalia gramteigiamų patogenų, kaip pavyzdžiui auksinio stafilokoko didėjantis gramneigiamų patogenų atsparumas, per pastaruosius metus buvo pastebėtos E. coli bakterijos ir Klebsiella. Koordinuotas higienos valdymas, kuris gali apimti tokias priemones kaip mikrobų minimizavimas plaunant visą kūną, yra vienas iš elementų, siekiant išvengti šių patogenų plitimo. Mūsų produktai išsiskiria greitu efektyvumu ir išskirtiniu odos ir gleivinės suderinamumu, todėl ypač tinka jautriai odai.

	Taikymo sritis			Efektyvumas			Produkto savybės					
	antimikrobinis valymas	higieninis rankų plovimas	antimikrobinis plaukų plovimas	efektyvus prieš virusus su apvalkalu įsk.. HCV, HBV, HIV	MRSAMRGN	A. baumannii	gali būti šildoma mikrobangų krosnelėje	bealkoholinis	pH neutralus odai	drėkinantis	bekvapis	bespalvis
DECONTAMAN WASH	✓						✓	✓	✓		✓	✓
DECONTAMAN WIPES	✓						✓	✓	✓		✓	✓
DECONTAMAN CAP			✓				✓	✓	✓	✓		✓
DECONTAMAN FOAM	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
DECONTAMAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓
DECONTAMAN LIQUID	✓							✓	✓		✓	✓



pirštinės valymui

DECONTAMAN WASH

antimikrobinės valymo pirštinės

- MRSA/MRGN kolonizuotų ligonių odos valymas
- nereikalingas nuskalavimas
- praktiškas ir greitas naudojimas, galimybė šildyti mikrobangų krosnelėje

DECONTAMAN WASH yra drėgnos pirštinės, skirtos odos ir gleivinių valymui. Jos ypač tinka antimikrobiniam nejudančių, o taip pat intensyvios terapijos pacientų ir infekcijos palatų valymui. Lyginant su tradiciniu valymu šluoste, tokiu būdu galima išvengti MRE perdavimo valymo metu. Puikus odos drėkinimas užtikrina saugų valymą ir sumažina nemalonių kūno kvapą. Dermatologiškai patikrinta

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 pakuotė 10 piršinių 14 x 23 cm	24	00-610-T010-02



DECONTAMAN WIPES

antimikrobinės valymo servetėlės

- MRSA ir MRGN kolonizuotų ligonių odos valymas
- paruoštos naudoti valymo servetėlės. Greitas ir patogus naudojimas
- puikiai tinka ir odai, ir gleivinei

Paruoštos naudoti, antimikrobinės servetėlės odos ir gleivinių valymui. Taip pat tinka labai jautriai odai tokių sričių, kaip stoma priežiūrai. Tirpalas, kuriame sumirkytos servetėlės, naikina bakterijas, įsk. MRSA ir vaistams atsparius patogenus, kaip MRGN, todėl valymo metu išvengiama MRE pernešimo. Sumažina mikroorganizmų kiekį ant odos ir apsaugo nuo nemalonaus kūno kvapo. Galima pašildyti mikrobangų krosnelėje

DECONTAMAN WIPES tinka naudoti ir pacientų, sergančių MRE, gulimo režimo pacientų valymui, o taip pat antimikrobiniam valymui po naudojimosi tualetu.

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 pakuotė 10 servetėlių 20 x 30 cm	24	00-610-T010

DECONTAMAN CAP

vienartinio naudojimo plovimo kepurė

- paruošta naudoti plovimo kepurė gulintiems pacientams
- antimikrobinis plaukų plovimas, kuriam nereikalingas vanduo ir šampūnas
- sudėtyje yra alantoino, alavijo ir ramunėlių ekstraktų, pantenolio ir vitamino E



DECONTAMAN CAP yra paruošta naudoti plovimo kepurė plaukų plovimui be vandens ir šampūno. Decontaman kepurė leidžia sutaupyti laiko, nes kruopščiai išplauna gulinčių pacientų plaukus, o po jos panaudojimo nereikalingas skalavimas. Tirpalas, kuriame sumirkytos DECONTAMAN CAP kepurės, yra antimikrobiškai efektyvus, todėl plovimo kepurė yra naudinga ir MRSA kolonizuotiems pacientams. DECONTAMAN CAP prieš naudojimą gali būti pašildoma mikrobangų krosnelėje ir. Mirkymo tirpalo pH yra neutralus ir jo sudėtyje yra plaukus tausojančių alavijo ir ramunėlių ekstraktų, alantoino, pantenolio bei vitamino E.

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 plovimo kepurė	30	00-950-001

DECONTAMAN FOAM

antimikrobinės rankų, odos ir plaukų plovimo putos

- baktericidinės
- paruoštos naudoti
- greitai veikiančios: kontaktinis laikas 30 s

DECONTAMAN FOAM yra antimikrobinės plovimo putos rankoms, odai ir plaukams, pasižyminčios puikiomis valymo savybėmis. Paruoštas putas labai patogiu naudoti ir jos yra skirtos labai užterštų kūno vietų valymui.

Antimikrobinės savybės	Naudojimo būdas
baktericidinis įsk. MRSA, didelis organinis užteršimas pagal VAH/DGHH/EN 13727	higieninė rankų dezinfekcija pagal VAH/EN 1499 konc. 30 sek.
efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu įsk. Hepatito B virusą/ŽIV/Hepatito C virusą	
Veikliųjų medžiagų 100 g	3.6 g 2-fenoksietanolis 0.15 g poliheksametilenbiguanidas



VAH/DGHH

ÖGHMP

PUTOS

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
200 ml putos su dozatoriumi	10	00-453FP-002

Saugiai naudokite dezinfekavimo priemones. Prieš pradėdami naudoti visada perskaitykite etiketę ir produkto informaciją.

DECONTAMAN

antimikrobinis odos ir rankų plovimo losjonas

- greitai veikiantis: kontaktinis laikas 30 s
- efektyvus prieš MRSA ir MRGN
- su drėkinančiomis ir švelniomis aktyviosiomis valomosiomis medžiagomis

Antimikrobinis odos ir rankų plovimo losjonas, skirtasi net ir esant dideliame riebalų ar baltymų kiekiui, kaip pavyzdžiui maisto pramonėje. Patvirtintas higieniniam rankų plovimui pagal Vokietijos higienos ir mikrobiologijos asociacijos (DGHH) standartus. Tinka antimikrobiniam MRSA ir kitais, atspariais daugeliui preparatų patogenais, tokiais kaip VRE, ESBL ir kitų MRGN, kolonizuotų ligonių kūno plovimui, ypač naudingas prieš guldant į ligoninę. Dėka švelnių aktyviųjų valomųjų ir drėkinančių medžiagų, DECONTAMAN tinka reguliariam naudojimui, įskaitant plaukų plovimą.

Antimikrobinės savybės	Naudojimo būdas
baktericidinis įsk. MRSA pagal VAH/DGHH/EN 13727/EN 1499	higieninė rankų dezinfekcija pagal VAH/DGHH/EN 13727/EN 1499 30 sek.
efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu įsk. Hepatito B virusą/ŽIV/Hepatito C virusą	Acinetobacter baumannii pagal EN 13727 15 sek.
Veikliųjų medžiagų 100 g	0.995 g poliheksametilenbiguanidas

Efektuvus prieš Acinetobacter baumannii



VAH/DGHH

ÖGHMP

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
500 ml butelis	20	00-405-005
1 L butelis	12	00-405-010EXP
5 L bakelis	3	00-405-050

Saugiai naudokite dezinfekavimo priemones. Prieš pradėdami naudoti visada perskaitykite etiketę ir produkto informaciją.

DECONTAMAN LIQUID

antimikrobinis odos ir gleivinės valymo tirpalas

- paruoštas naudoti
- bespalvis ir bekvapis
- sumažina infekcijos vystymąsi odos žaizdose įsk. MDRO, ir apsaugo nuo nemalonaus kūno kvapo

Paruoštas naudoti antimikrobinis valymo tirpalas odai ir gleivinei. Tinka jautriai odai. DECONTAMAN LIQUID sumažina mikroorganizmų kiekį ant odos, įskaitant atsparius daugeliui preparatų patogenus, ir apsaugo nuo nemalonaus kūno kvapo.

Efektuvus prieš Acinetobacter baumannii



Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
250 ml butelis	30	00-610-0025
500 ml butelis	20	00-610-005
1 L butelis	10	00-610-010EXP



Plovimas

22-23

Rankų ir odos plovimas

24-25

Odos valymas ir odos priežiūra

Rankos ir oda

Plovimas

Rankos ir oda

Plovimas

Odą ir rankas būtina valyti, kai jos yra nešvarios, suprakaitavę arba lipnios. Tai yra bendros kūno higienos priemonė, kuri yra būtina, kad rankų dezinfekcija būtų efektyvi.

Kadangi valymo proceso metu kartu su nešvarumais yra pašalinami odos riebalai ir drėkinimo faktoriai, rekomenduojama naudoti plovimo losjoną su odą tausojančiais komponentais.

Naudojant mūsų higienines servetėles, oda ir valoma, ir drėkinama.

Taikant šį valymą be vandens, išvengiama išsausinimo efekto ir oda išlieka apsaugota.

Pasirenkant valymo produktus, kaip ir visas odos priežiūros priemones, reikia atsižvelgti į vartotojo odos tipą.

	Medžiagos									Produkto savybės					Taikymo sritis			
	neutralus odos pH	drėkinantis	papildytas lipidais ir/arba augaliniais aliejais	odos regeneravimo medžiagos	be PEG	be šarmo ir muilo	be dažiklių	be kvapų	be konservantų	servetėlė	pirštinė	servetėlės/pirštinės dydis centimetrais	servetėlių/pirštinių kiekis	hipoalerginė formulė	normali oda	sausą oda	labai sausa oda	jautri oda
SALINA	✓		✓			✓	✓								✓			
DESCOSOFT	✓		✓			✓									✓	✓		
DESCOSAN	✓		✓			✓	✓								✓	✓		✓
DESCOSAN KAMILLENDUFT	✓		✓			✓	✓								✓	✓		
prolind Waschlotion sensitive	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓
OPTIWASH	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	14x24	10	✓	✓	✓	✓	✓
DESOBATH WIPES	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓		22x33	10		✓	✓	✓	✓
DESODERM CARE WIPES	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		18x20	80	✓	✓	✓	✓	✓
BABY WIPES SENSITIVE	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		18x20	80	✓	✓	✓	✓	✓



SALINA

plovimo losjonas

- citrinų kvapo
- pH neutralus
- odą drėkinantis

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
500 ml butelis	20	00-631-005
1 L butelis	12	00-631-010EXP
5 L bakelis	3	00-631-050
10 L bakelis	1	00-631-100

SALINA plovimo losjonas yra švelnus valiklis su neutraliu pH, skirtas dažnam ir intensyviai odos ir rankų plovimui.

Odą tausojančios ir drėkinančios medžiagos apsaugo odos fiziologinį vientisumą ir apsaugo odą nuo išdžiūvimo. Ekonomiškas naudojimas.



DESCOSOFT

plovimo losjonas

- ypač gaivus kvapas
- odai palankus pH
- mėlynos spalvos, kad būtų lengviau identifikuoti pripildymo lygį

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
500 ml butelis	20	00-607-005EXD
1 L butelis	12	00-607-010EXD
5 L bakelis	3	00-607-050EXD
10 L bakelis	1	00-607-100EXD

Ypač gaivaus kvapo švelnus ir odai palankus losjonas plovimui DESCOSOFT pH yra neutralaus ir jo sudėtyje yra minkštiklių, kurie padeda palaikyti natūralią odos apsaugą nuo išsausėjimo.



DESCOSAN

odą tausojantis plovimo losjonas jautriai odai

- ypač švelnus odai
- pH neutralus
- rekomenduojama asmenims, turintiems jautrią odą

jautriai odai

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
500 ml butelis	20	00-601N-005
1 L butelis	12	00-601N-010
5 L bakelis	3	00-601N-050
10 L bakelis	1	00-601N-100

DESCOSAN yra neutralaus pH, odą tausojantis losjonas rankų ir odos plovimui. Aukščiausios kokybės odą tausojantys ingredientai ir drėkinimo komponentai apsaugo odos fiziologinį vientisumą ir palaiko natūralią odos apsaugą nuo išsausėjimo.

DESCOSAN plovimo losjonas yra ekonomiškasis ir jo sudėtyje yra aukščiausios kokybės ingredientai, kurie nedirgina akių ir gleivinių. Tinka kūdikių ir vaikų maudymui ir prausimui.

DESCOSAN losjono sudėtyje nėra šarmo ir muilo.

DESCOSAN KAMILLENDUFT

odą tausojantis plovimo losjonas sudirgintai odai

- ypač švelnus odai
- pH neutralus
- su natūraliu ramunėlių ekstraktu



DESCOSAN KAMILLENDUFT yra neutralaus pH, odą tausojantis losjonas, skirtas rankoms ir odai plauti. Jis yra malonaus ir švelnaus ramunėlių kvapo. Odą tausojantys ingredientai ir drėkinimo komponentai apsaugo odos fiziologinį vientisumą ir palaiko natūralią odos apsaugą nuo išsausėjimo. Ekonomiškas naudojimas.

sudirgintai odai

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
500 ml butelis	20	00-616-005
1 L butelis	12	00-616-010
5 L bakelis	3	00-616-050

Waschlotion sensitive

hipoalergiškas plovimo losjonas sausai odai

- sudėtyje yra odą tausojančių ingredientų
- sudėtyje yra drėkinančio migdolų aliejaus
- bekvapis ir bespalvis



prolind Waschlotion sensitive yra ypač švelnus ir odą tausojantis plovimo losjonas. Idealus jautrios ir sudirgintos odos valymui. prolind Waschlotion sensitive sudėtyje yra cukraus tenzidų ir betaino darinių, ypač švelnių valomųjų medžiagų, kurios leidžia švelniai nuvalyti odą. Migdolų aliejus palaiko odos regeneraciją. prolind Waschlotion sensitive yra be kvapų ir dažiklių, kaip ir visi mūsų prolind produktai.

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
100 ml butelis	30	00-614-001
500 ml butelis	20	00-614-005
1 L butelis	12	00-614-010



prolind sensitive

jautrios ir sudirgintos odos apsauga ir priežiūra

Sveikatos priežiūros įstaigų personalo rankos yra svarbiausi ir tuo pat metu labiausiai pažeidžiami darbo įrankiai. Dažnas rankų plovimas, ilgalaikis pirštinių dėvėjimas ir darbas su chemikalais veikia odą. Tai gali sutrikdyti odos regeneraciją ir pažeisti natūralią odos apsauginę funkciją; dėl to gali atsirasti alergijos. Tinkamų produktų pasirinkimas yra būtina sąlyga tinkamai rankų apsaugai priežiūrai. Pagrindinė užduotis yra kompensuoti kasdienės veiklos daromą žalą ir išlaikyti sveiką rankų odą. Šito galima pasiekti, naudojant odą tausojančius ar apsaugančius ingredientus ir vengiant alergiją sukeliančių medžiagų. prolind sensitive serija buvo sukurta siekiant užkirsti kelią alerginėms reakcijoms ir kaip įmanoma geriau pasirūpinti bei apsaugoti odą. Gautas rezultatas yra apsaugos priemonių linija, be kvapų ir dažiklių, sujungianti aukštą kokybę, apsauginius ir maitinamuosius ingredientus.





OPTIWASH®

šlapios vienkartinės viso kūno plovimo pirštinės

- valymas ir priežiūra – be vandens, muilo ir rankšluosčių
- naudojimos šiltos arba šaltos
- dermatologiškai patikrinta

Šlapios OPTIWASH® vienkartinės pirštinės, pagamintos iš minkštos neaustinės medžiagos, skirtos švelniam ir profesionaliam pacientų, ypač nejudančių, viso kūno arba atskirų kūno dalių valymui. Kiekvienoje pakartotinai sandariai uždaroje pakuotėje yra 10 pirštinių, kuriomis gali būti valomos visos paciento kūno sritys (žr. paveikslėlį ant pakuotės).

OPTIWASH® vienkartinės pirštinės gali būti naudojamos šiltos, kas yra labai malonu pacientui arba šaltos, kai pacientas karščiuoja arba karštais vasaros mėnesiais. OPTIWASH® pirštinės ne tik švelniai valo, bet ir ramina odą, nes jų sudėtyje yra ne tik labai švelnių natūralių tenzidų, bet ir odą tausojančių veikliųjų ingredientų: alavijo, alantoino ir glicerino. Taip pat OPTIWASH® pirštinės maloniai kvepia.

OPTIWASH® pirštinės užtikrina higienišką kūno valymą ir užkerta kelią mikrobų perdavimui iš vienos kūno dalies į kitą, nes, priešingai nei įprasti plovimo reikmenys, panaudotos servetėlės yra išmetamos, OPTIWASH® vienkartinės pirštinės yra paruoštos naudoti. Kadangi OPTIWASH® pirštinių, lyginant su naudojamais įprastiniais rankšluosčiais ir plaušinėmis, nereikia perdirbti, sutaupoma ne tik laiko bet ir kaštų (elektros, vandens, plovimo priemonių).

OPTIWASH® šlapios vienkartinės pirštinės suteikia higienišką ir ekonomiškai efektyvų sprendimą paciento dalinio ar viso kūno valymui.



šlapios pirštinės

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 pakuotė 10 pirštinių (14 x 23 cm)	24	00-639NK-T010



Desotex odos priežiūros servetėlės

Dr. Schumacher verslo grupė nėra tik specializuota dezinfekcijos, valymo ir kosmetinių produktų gamintoja, ji yra viena iš pirmaujančių kompanijų Europoje, gaminanti sausas ir šlapias servetėles plačiam naudojimui. Vienkartinė servetėlių gamyboje taikoma įvairių mirkymo tirpalų gamybos patirtis ir modernių gamybos ir dizaino technologijų sinergija užtikrina puikią produktų kokybę ir ypatingą komfortą bei efektyvumą pacientui.



DESOBATH WIPES

šlapios servetėlės kūno ir jautrių jo sričių valymui

- idealiai tinka pacientų valymui ir priežiūrai
- sudėtyje yra pantenolio ir alantoino
- nereikia nuplauti

Iš storos, minkštos, neaustinės medžiagos pagamintos DESOBATH WIPES yra skirtos švelniam ir profesionaliam nejudančių pacientų valymui. Kiekvienoje pakartotinai sandariai uždarojoje pakuotėje yra 10 šlapių DESOBATH WIPES šluosčių, kurios gali būti naudojamos arba šiltos, arba šaltos. DESOBATH WIPES švelniai valo ir ramina odą, nes jų sudėtyje yra labai švelnūs natūralūs tenzidai bei odą tausojantys veiklieji ingredientai: pantenolis ir alantoinas. DESOBATH WIPES yra vienkartinio naudojimo, todėl užtikrina higienišką kūno valymą. Kadangi po kiekvieno naudojimo servetėlės yra išmetamos, išvengiama mikrobų perdavimo iš vienos kūno dalies į kitą. DESOBATH WIPES išimamos po vieną ir yra paruoštos naudoti iš karto.



NAUJA

šluostės

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 pakuotė 10 servetėlių (22 cm x 33 cm)	16	00-604DW1-T010

DESODERM

CARE WIPES

šlapios servetėlės

- odos valymui
- itin minkštas neaustinis audinys
- be alkoholio ir be kvapiųjų medžiagų

DESODERM CARE WIPES yra skirtos švelniam valymui ir ypač jautrios odos priežiūrai. DESODERM CARE WIPES yra labai minkštos ir malonios odai. Jos yra impregnuotos švelniu losjonu, kurio sudėtyje yra augalinių valančiųjų ir odą tausojančių medžiagų, tokių kaip alavijo ekstraktas, alantoinas ir glicerinas. DESODERM CARE WIPES ne tik valo, bet ir tausoja bei ramina odą. Puiki servetėlių audinio kokybė leidžia sudėtyje esančioms tausojančioms ir valomosioms medžiagoms tolygiai pasiskirstyti ant odos.



NAUJA

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 pakuotė 80 servetėlių (18 x 20 cm)	12	DT-639NK-T080

BABY WIPES SENSITIVE

valymo servetėlės švelniai kūdikių odos priežiūrai

- su alaviju ir alantoinu
- be kvapų, alkoholio, dažiklių, polietileno glikolio (PEG) ir mineralinio aliejaus
- odai palankus pH
- kliniškai išbandytas odos suderinamumas

BABY WIPES SENSITIVE servetėlės pritaikytos jautriai kūdikių odai ir gali būti naudojamos viso kūno valymui. Švelnios sudėties servetėlės yra rekomenduojamos DAAB (Vokietijos alergijos ir astmos asociacijos) ir tinka netgi neurodermatitu sergantiems pacientams.



Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 pakuotė 80 servetėlių (18 x 20 cm)	12	01-639NK-T080

Rankos ir oda

Priežiūra

28-29

Odos apsauga ir rankų priežiūra

30-31

Odos ir kūno priežiūra

Rankos ir oda

Priežiūra

Rankos ir oda

Priežiūra

Kasdienis guminių pirštinių dėvėjimas, dažnas rankų plovimas, o taip pat medicinoje naudojamos medžiagos ir priemonės kenkia odai.

Neprižiūrima oda greitai išsausėja. Dėl šios priežasties oda suskilinėja ir stipriai nukenčia jos apsauginė funkcija – mikrobai gali prasiskverbti į kūną ir sukelti infekcijas.

Mūsų produktų asortimente yra odos priežiūros produktų su aukštos kokybės aliejais ir drėkinančiais bei regeneruojančiais ingredientais. Siūlomi ir ypač švelnūs plovimo losjonai.

Švelnus valymas ir intensyvi priežiūra padeda išlaikyti sveiką odą kasdienės veiklos metu.

O/W = aliejus vandenyje emulsija
W/O = vanduo aliejuje emulsija
E = be emulgatorių

	Ingridientai										Produkto savybės						Taikymo sritis				
	neutralus odos pH	drėkinantis	Papildytas lipidais ir/arba augaliniais aliejais	Odos regeneravimo medžiagos	be silikono	be parafino	be PEG	be dažiklių	be kvapų	be konservantų	emulsijos tipo	kremas	losjonas	putos	tinkamas naudoti dozatoriuose	vėsinimasis poveikis	hipoalerginė formulė	normali oda	sausą oda	labai sausa oda	jautri oda
O/W = aliejus vandenyje emulsija W/O = vanduo aliejuje emulsija E = be emulgatoriaus																					
BIALIND	✓			✓	✓	✓		✓			O/W	✓		✓				✓			
JOBALAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			O/W	✓		✓					✓	✓	
DESOLIND PROTECT	✓		✓	✓	✓		✓	✓			W/O	✓						✓			
prolind Pflegecreme sensitive	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	O/W	✓			✓		✓	✓	✓		✓
prolind Intensiv-Pflegecreme sensitive	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	W/O	✓					✓		✓	✓	✓
prolind Hautschutzcreme sensitive	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	E		✓		✓		✓		✓	✓	✓
DESCOMED	✓	✓		✓	✓	✓		✓						✓				✓	✓	✓	
DESCOMED ÖLBAD	✓	✓	✓	✓	✓			✓										✓	✓	✓	
DESOLIND BALM	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		O/W		✓						✓	✓	✓
DESCO VITAL	✓		✓		✓	✓		✓					✓		✓	✓		✓	✓	✓	
DESCO PINOL	✓		✓		✓	✓		✓					✓		✓	✓		✓	✓	✓	

Odos apsauga ir rankų priežiūra



BIALIND®

rankų ir odos priežiūros losjonas

- greitai susigeria į odą nepaliekant riebalų likučių
- sudėtyje yra odos regeneraciją palaikančio alantoino
- pritaikytas prie odos pH

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
100 ml tūbelė	12	00-602-001
500 ml butelis	20	00-602-005

BIALIND® yra vandens aliejuje (V/A) tipo emulsija sudirgusiai odai. BIALIND® maitina ir apsaugo sudirgusią nuo dažno plovimo bei dezinfekavimo rankų odą. Idealiai tinka medicinos ir sveikatos priežiūros specialistams, nes ji gerai susigeria į odą, nepaliekant riebalų likučių. Net ir dažnai naudojant, nesutrikdomos kasdienės darbo procedūros. Losjono sudėtyje yra specialaus odą tausojančio ir regeneruojančio komponento alantoino.



JOBALAN®

rankų ir odos priežiūros losjonas

- sudėtyje yra specialių sudirgusią odą apsaugančių ingredientų
- intensyviai drėkina ir regeneruoja odą
- sukuria ant odos švelnią apsauginę plėvelę

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
100 ml tūbelė	12	00-608-001
500 ml butelis	20	00-608-005

JOBALAN® yra aliejaus vandenyje (A/V) tipo emulsija labai sudirgusiai odai. Jos sudėtyje yra specialių odą apsaugančių ingredientų, tokių kaip simondsijų ir vynuogių sėklų aliejai, D-pantenolis (provitaminas B5) ir vitaminas C. Todėl JOBALAN® turi odą drėkinantį ir regeneruojamą poveikį. JOBALAN® sudėtyje yra natūralaus antioksidanto vitamino E ir nėra silikono bei parafino aliejų, polietilenglikolių (PEG) ir alkoholių. JOBALAN® losjono pH yra neutralus odai, todėl jis greitai ir gerai susigeria, nepalikdamas riebumo pojūčio ant odos. JOBALAN® losjonas sukuria ant odos švelnią neriebią apsauginę plėvelę, todėl jo poveikis yra ilgalaikis.



DESOLIND Protect

apsauginis kremas

- vandens aliejuje (V/A) tipo emulsija
- sudėtyje yra vitamino E ir bičių vaško
- apsaugo odą nuo vandenyje tirpių medžiagų

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
100 ml tūbelė	12	DT-645-001

DESOLIND Protect buvo sukurtas personalo rankų apsaugai jų kasdiniame darbe. Vandens aliejuje tipo (V/A) emulsija sukuria ant odos apsauginę plėvelę, kuri padeda išvengti pažeidimų, ypač kai darbas yra susijęs su drėgme.

Pflgecreme sensitive hipoalerginis priežiūros kremas jautrioms ir sausoms rankoms

- sudėtyje yra taukmedžio sviesto, migdolų aliejaus ir vitamino E
- sausai ir jautriai odai
- be kvapiųjų medžiagų, dažiklių ir konservantų



prolind Pflgecreme sensitive ypač tinka jautrios odos apsaugai ir priežiūrai. Jo sudėtyje yra itin kokybiškų ir švelnių ingredientų, kurie gali užkirsti kelią odos pažeidimui ir/arba kompensuoti prasidedantį odos viršutinio sluoksnio pažeidimą. prolind Pflgecreme sensitive sudėtyje yra lipidus papildančių medžiagų: migdolų aliejaus, taukmedžio sviesto ir parafino aliejaus. Jos gali prasiskverbti į odos viršutinį sluoksnį ir, pakeisdamos išplautus lipodus, suformuoti apsauginę plėvelę ant odos, užkertančią kelią tolesniems pažeidimams. Odą tausojantis emulsiklis ricinos aliejaus pagrindu padeda palaikyti odos lipidų pusiausvyrą. Drėkikliai, kaip pavyzdžiui glicerinas, palaiko odos viršutinio sluoksnio elastingumą ir stabilumą.

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
100 ml tūbelė	12	00-620HC-001
500 ml butelis	20	00-620HC-005

Intensiv-Pflgecreme sensitive hipoalerginis kremas jautrios ir labai sausos rankų odos priežiūrai

- sudėtyje yra avokado aliejaus, pantenolio, alantoino ir vitamino E
- subalansuotai jautrios ir į alergiją linkusios odos priežiūrai
- be kvapiųjų medžiagų, dažiklių ir konservantų



prolind Intensiv-Pflgecreme sensitive yra vanduo aliejuje (V/A) tipo emulsija skirta intensyviai ir ilgalaikiai sudirgusių rankų priežiūrai. V/A-krema paprastai sukuria lipidų apsauginę juostelę prieš hidrofilines medžiagas; todėl kremas ne tik tausuoja odą, bet ir atlieka odos apsauginę funkciją. Aukščiausia kokybė ir ingredientų gausa, kaip pavyzdžiui vitaminas E, alantoinas, pantenolis ir glicerinas palaiko odos regeneraciją. Odos natūralūs aliejai, kurie buvo išplauti, yra pakeičiami; odos drėgmė atstatoma taip, kad ji tampa švelni ir elastinga. Nepaisant gausios prolind Intensiv-Pflgecreme sensitive sudėties, jis greitai įsigeria, kas leidžia nedelsiant atnaujinti darbą. prolind Intensiv-Pflgecreme sensitive yra be kvapiųjų medžiagų, dažiklių ir konservantų; be to jis yra be silikoninio aliejaus ir poletilenglikolio (PEG).

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
100 ml tūbelė	12	00-620WO-001

Hautschutzcreme sensitive hipoalerginis odą apsaugantis ir tausojantis losjonas

- su taukmedžio sviestu
- jautriai ir sausai bei labai sausai odai
- be kvapiųjų medžiagų, dažiklių ir konservantų



prolind Hautschutzcreme sensitive losjonas skirtas jautrios odos apsaugai ir priežiūrai. Jo sudėtyje yra itin kokybiškų ir švelnių ingredientų, kurie gali užkirsti kelią odos pažeidimui ir/arba kompensuoti jau prasidėjusį odos viršutinio sluoksnio pažeidimą.

prolind Hautschutzcreme sensitive sudėtyje yra hamamelio ekstrakto, palaikančio odos vientisumą. Todėl sumažinami tokie nemalonūs pojūčiai, kaip pavyzdžiui odos pabrinkimas dėvint pirštines. Lipidus atkuriantis medžiagos, taukmedžio sviestas ir parafino aliejus, gali prasiskverbti į viršutinį odos sluoksnį, atkurti išplautus lipodus ir sukurti ant odos apsauginę plėvelę. Drėkikliai, kaip pavyzdžiui glicerinas, palaiko odos viršutinio sluoksnio elastingumą ir stabilumą. prolind Hautschutzcreme sensitive losjonas yra pagamintas be emulsiklių ir todėl yra ypač malonus odai.

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
100 ml tūbelė	12	00-620HS-001
500 ml butelis	20	00-620HS-005



DESCOMED

odos valymo putas

- lengvas valymas nenaudojant vandens ir muilo
- labai jautriai odai
- gaivumo poveikis

DESCOMED odos valymo putas yra paruoštos naudoti švelniam odos valymui ir odos priežiūrai, ypač gulintiems, šlapimo nelaikantiems ir pacientams su stoma. DESCOMED odos valymo putų pH yra neutralus odai ir jų sudėtyje yra labai švelnių valymo medžiagų, kurias ypač gerai toleruoja oda ir gleivinės. Drėkinamasis D-pantenolio ir alantoino poveikis palaiko itin sudirgusios odos regeneraciją, ramina odos sudirginimus ir paraudimus, ir teikia specialią pagalbą sutrūkinėjusiai odai. DESCOMED odos valymo putas taip pat gali būti naudojamos kūdikių priežiūrai.

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
500 ml aerosolio indelis	12	00-604-005



DESCOMED Ölbad

medicininis vonios aliejus odos priežiūrai

- intensyviai ypač sausos ir jautrios odos priežiūrai
- sudėtyje yra odą tausojančių aliejų
- su alaviju, pantenoliu ir vitaminu E

DESCOMED Ölbad yra medicininis vonios aliejus, naudojamas kaip vonios priedas sausos, pleiskanojančios ir sudirgusios odos gydymui. Aukštos kokybės odą tausojančius ingredientus, tokius kaip alavijo ekstraktas, rapsų ir simondsijų aliejai, gerai toleruoja oda ir gleivinės. D-pantenolis padeda sušvelninti odos sudirginimus bei paraudimus, ir skatina sutrūkinėjusios odos regeneraciją. DESCOMED Ölbad puikiai drėkina, todėl itin tinka šlapimo nelaikančių, stoma ar gulinčių pacientų odos priežiūrai ir pragulų profilaktikai, o taip pat asmenims, kenčiantiems nuo sebotazės ir sudirgusios odos.

vonios aliejus

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
250 ml PET-butelis	9	00-609-0025
500 ml butelis	6	00-609-005
2 L butelis	6	00-609-020



DESOLIND BALM

sudirgusios ir pažeistos odos priežiūra

- sudėtyje yra 10% šlapalo (urea)
- greitai įsigeria į odą, ekonomišką naudojimą
- malšina niežulį

Glotnus ir minkštas putų losjonas kūno priežiūrai labai tinka sausai ir reikliai, linkusiai į sudirginimą, odai. DESOLIND Balm komponentas šlapalas (urea), padeda išsaugoti drėgmę viršutiniame odos sluoksnyje ir tokiu būdu užkerta kelią odos dehidratacijai.

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
250 ml aerosol butelis	10	DT-950-0025

DESCO VITAL

įtrinamas į odą gaivinamasis gelis

- atgaivina odą ir stiprina cirkuliaciją odoje
- sudėtyje yra aukštos kokybės vaistinių augalų ekstraktų
- puikus odos pojūtis dėl optimaliai parinktų drėkinimo komponentų



DESCO VITAL Gel yra hidrogelis audinių kraujotakos stimulavimui su vertingomis vaistinių augalų: eglių spyglių, eukaliptų, kadagių ir čiobrelėlių, esencijomis.

Jis idealiai tinka sportininkų ir gydomajam masažui, bendrai slaugai, nepažeistai gulinčių pacientų odos pragulų profilaktikai, o taip pat visose kitose medicinos srityse, kur reikalingas vėsinamasis ir raumenis atpalaiduojantis poveikis. DESCO VITAL Gel yra gryno etanolio pagrindu ir jo sudėtyje yra drėkinamųjų ingredientų, kuriuos oda toleruoja ypač gerai.

gaivinamasis

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
100 ml tūbelė	30	00-605-001
500 ml butelis	20	00-605-005

DESCO PINOL

gaivinamasis tirpalas odos priežiūrai

- atgaivina odą ir stiprina cirkuliaciją odoje
- sudėtyje yra vertingų vaistinių augalų ekstraktų
- malonus vėsinamasis ir raumenis atpalaiduojantis poveikis



DESCO PINOL yra izopropilo alkoholio pagrindu pagamintas tirpalas su aukštos kokybės eglių spyglių, kadagių uogų ir pušų spyglių eteriniais aliejais odos ir audinių kraujotakos stimulavimui. DESCO PINOL turi malonų vėsinamąjį ir raumenis bei odą atpalaiduojantį poveikį, aktyvina raumenis po varginančios veiklos. Ypač tinka sportininkų ir gydomajam masažui, bendrai slaugai. Taip pat tinka vėsinamiesiems kompresams ir pėdų priežiūrai.

DESCO PINOL sudėtyje yra drėkinamųjų ingredientų, apsaugančių odos lipidų sluoksnį ir odą nuo išdžiūvimo.


gaivinamasis

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
250 ml purškiamas buteliukas	30	00-606-00255
1 L butelis	10	00-606-010

Šlapalo (urea) poveikis sausai odai

Šlapalas (urea) yra vienas iš junginių, kurie sudaro higroskopinį „natūralų drėkinantį faktorių“, sutrumpintai NMF- junginį, kurie leidžia išsaugoti natūralią drėgmę odoje ir išlaikyti ją lygią ir elastingą. NMF, be šlapalo (urea), sudaro ir daug kitų medžiagų, kaip pavyzdžiui glicerinas, pirolidono karboksirūgštis, pieno rūgštis, amino rūgštis ir kiti komponentai. Šlapalu (urea) praturtintų produktų naudojimas sausos

arba labai sausos odos priežiūrai gali laikinai atkurti odos drėkinimą. Reguliarus produktų, kurių sudėtyje yra šlapalo (urea), naudojimas pagerina arba atkuria odos apsauginę funkciją. Tai patvirtinta įvairiais tyrimais, atliktais su sausa oda. Šiame kontekste padidėja ir odos tolerancija dirginančioms medžiagoms.

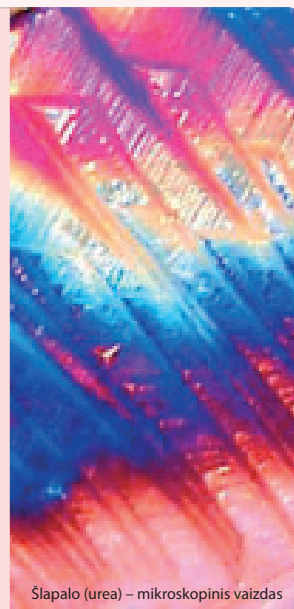

Šlapalo (urea) – mikroskopinis vaizdas

Instrumentai

Dezinfekcija, valymas, apdorojimas ir priežiūra

Dezinfekcija ir valymas

34-41

Rankinė dezinfekcija ir valymas

Apdorojimas

42-44

Automatinis apdorojimas

Priežiūra

45

Instrumentų priežiūra

Instrumentai

Dezinfekcija, valymas, apdorojimas ir priežiūra

Užteršti patogeniniais mikrobais medicinos prietaisai gali tapti infekcijos šaltiniais.

Pagrindiniai reikalavimai, kurie keliami instrumentų dezinfekantams - patikima dezinfekcija, platus veikimo spektras ir geros valymo savybės.

Ne mažiau svarbu, kad produktą būtų patogiu naudoti.

Esminiai visų mūsų produktų kokybės kriterijai yra kuo mažesnis pavojingų cheminių medžiagų kiekis, patogumas ir apsauga vartotojui ir aplinkai. Kurdami savo produktus, ypatingą dėmesį mes skiriame medžiagų suderinamumui.

		Taikymas					Taikymo sritis				Veikliosios medžiagos				Savybės				Veiklos spektras										Produkto tipas
		chirurginiai instrumentai	lankstūs endoskopai	standieji endoskopai	TEE-daviklis	ultragarso vonelė	valymas	dezinfekcija	virusidinis galutinis dezinfekavimas	peracto rūgštis	QAC	alkilaminai	gliutaraldehidai	enzimai	mažai kvapų	švelnumas medžiagoms	apsauga nuo korozijos	neutralus pH	baktericidinis	mielicidinis (C. albicans)	tuberkulocidinis	sporidinis	efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu įsk. HBV/ŽIV/HCV	virusidinis	VAH	RKI (Robert-Koch-Institute)	koncentratas	paruoštas naudoti	
NAUJA	PERFEKTAN® active	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓			
NAUJA	PERFEKTAN PAA	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓			✓			
	PERFEKTAN NEU	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓			
	PERFEKTAN TB	✓		✓		✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓			
	PERFEKTAN extra	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓				✓			
	PERFEKTAN ENDO	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓			
	DESCOTON EXTRA	✓	✓	✓				✓	✓				✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
	DESCOTON FORTE	✓	✓	✓				✓	✓				✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		
	DESCOTON 2% GDA	✓	✓	✓	✓			✓					✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓						✓	
	DESCO CLEANER	✓				✓	✓								✓											✓			
	PLURAZYME extra	✓	✓	✓		✓	✓						✓	✓	✓		✓									✓			
	INSTRU PLUS	✓	✓	✓		✓	✓							✓	✓		✓									✓			

NAUJA

PERFEKTAN® active

peracto rūgšties pagrindu pagamintų miltelių koncentratas

instrumentų dezinfekcijai

- virusidinis aktyvumas pagal RKI/DVV
- puikus medžiagų suderinamumas
- aukščiausia valymo klasė
- visiškai tirpus

Produkto savybės

PERFEKTAN® active yra labai veiksmingas miltelių koncentratas rankinei visų rūšių medicininių instrumentų dezinfekcijai. Tai mažai dulkantys milteliai, kurie patikimai, saugiai ir greitai ištirpsta vandenyje. PERFEKTAN® active sukurtas peracto rūgšties, kuri susiformuoja švelniame šarminiame tirpale, pagrindu. Produktas sujungia tokias savybes kaip puikios antimikrobinės savybės ir medžiagų suderinamumas. Su PERFEKTAN® active išvengiama proteinų fiksacijos ir užtikrinama saugi dezinfekcija net ir esant sudėtingoms sąlygoms.

Sudėtis

Veikliosios medžiagos:

Peracto rūgštis(in-situ) > 850 ppm (1 % tirpalas).

Ingredientai pagal Ploviklių reglamentą

648/2004/EB:

PERFEKTAN® active sudėtyje yra:

< 5% nejoninių, aktyviųjų paviršiaus medžiagų, fosfonatų

> 30% natrio perkarbonato

Instrumento dezinfekcija per

5 min.

(pagal VAH)

Koncentracija ir ekspozicijos laikas

Antimikrobinės savybės		1 min.	5 min.	15 min.	30 min.	60 min.
Instrumento dezinfekcija pagal DGHM/VAH/EN14561/EN14562 ((baktericidinis, mielicidinis)	užterštos sąlygos		1,0 %			
Instrumento dezinfekcija pagal DGHM/VAH/EN14563 (tuberkulocidinis)	užterštos sąlygos				2,0 %	1,0 %
Instrumento dezinfekcija pagal DGHM/VAH/EN14562 (fungicidinis, Aspergillus brasiliensis)	užterštos sąlygos				3,0 %	2,0 %
Efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu ir be apvalkalo įsk. HBV/HIV/HCV (virusidinis)	pagal RKI/DVV				2,0 %	1,0 %
	Polio virusas				2,0 %	1,0 %
	Adeno virusas			0,5 %		
	Papova virusas /		1,0 %	0,5 %		
	Vaccinia virusas	0,25 %				
sporicidinis (Clostridium difficile)	pagal EN 13704			2,0 %	1,0 %	0,5 %

Pakuotės

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 kg kibirėlis	6	00-155-010
40 g maišelis	100	00-155-0004

NAUJA

PERFEKTAN® PAA

CE 0482

skystas koncentratas rankinei instrumentų dezinfekcijai
dvikomponentis koncentratas: bazinis komponentas ir aktyvatorius

- standiems ir lankstiems endoskopams
- veikia iš karto
- pilnas efektyvumo spektras

Produkto savybės

Perfektan® PAA yra labai efektyvus koncentratas rankinei visų rūšių chirurginių instrumentų dezinfekcijai. Perfektan® PAA paprasta naudoti, nes 2 skysti komponentai veikia iš karto ir yra išvengiama ilgo miltelių pagrindu pagamintų produktų paruošimo proceso. Aukščiausias Perfektan® PAA efektyvumas pasiekiamas maišant skystą peracto rūgšties aktyvatorių su baziniu komponentu. Perfektan® PAA puikiai tinka, kai instrumentų dezinfekcijai reikalingas maksimalus ir greitas efektas net ir esant dideliu organiniam užteršimui.

Paskirtis

Rankiniam pirminiam endoskopų valymui prieš termo-cheminį apdorojimą. Rankinei visų rūšių medicininių prietaisų dezinfekcijai (chirurginiai instrumentai, anestezijos įranga), taip pat standiems ir lankstiems endoskopams.

Naudojimas

Tam, kad paruošti 1% tirpalą, reikia 10 l vandens (2% = 5 l) praskiesti visą 2x 100 ml koncentrato buteliukų turinį. Koncentrato bazinis komponentas ir koncentrato aktyvatorius visada turi būti naudojami kartu.

SVARBU: Užtikrinkite, kad nebūtų kontakto tarp koncentrato bazinio komponento ir koncentrato aktyvatoriaus, pilant abiejų buteliukų turinį į vandenį. Abu buteliukai turi būti visiškai ištuštinti. Koncentracija ir kontaktinis laikas neturi būti viršyti.

Antimikrobinės savybės

- baktericidinis (įsk. MRSA)
- tuberkulocidinis
- mikobaktericidinis
- mielicidinis
- virusidinis
- sporicidinis

Pakuotės

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
2 x 100 ml butelis	4 x 2	00-157-001



Dozavimas	1 %	2 %
5 litrai	--	1 x buteliukų rinkinys
10 litrai	1 x buteliukų rinkinys	2 x buteliukų rinkinys

Koncentracija ir ekspozicijos laikas

Antimikrobinės savybės		1 min.	5 min.	15 min.	30 min.	60 min.
Instrumento dezinfekcija pagal DGHM/VAH/EN14561/EN14562/EN14563 (baktericidinis, mielicidinis, mikobaktericidinis)	užterštos sąlygos		2,0 %			1,0 %
Efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu ir be apvalkalo įsk. HBV/HIV/HCV (virusidinis)	pagal EN 14476, švarios sąlygos			2,0 %		
	Polio virusas			2,0 %		
	Adeno virusas		1,0 %			
	Noro virusas (MNV)		1,0 %			
sporidinis (Clostridium difficile)	pagal EN 13704, užterštos sąlygos		2,0 %		1,0 %	

VAH/DGHH

CE 0482



išbandyti ir taikomi
STORZ

be aldehydų

Vienetas	Partijos Nr.
1 L Dozavimas butelis	10 00-136-010
2 L butelis	6 00-136-020
5 L bakelis	3 00-136-050

PERFEKTAN® NEU

koncentratas be aldehydų instrumentų valymui ir dezinfekcijai

- tuberkulicidinis
- puikios valomosios savybės
- idealiai tinka chirurginių instrumentų valymui ultragarsinėse vonelėse

PERFEKTAN® NEU yra skystas koncentratas veikliosios medžiagos alkilamino pagrindu. Pasižymi puikiomis valymo savybėmis ir aukštu medžiagų suderinamumu. Sudėtyje nėra aldehydų ir fenolių. Produktas nefiksuoja proteinų ir idealiai tinka pirminiam instrumentų ir endoskopų valymui.

Antimikrobinės savybės	Naudojimo būdas
baktericidinis įsk. MRSA, mielicidinis pagal VAH/DGHH	Instrumentų dezinfekcija pagal Vokietijos reglamentus/VAH/DGHH: užterštomis sąlygomis: 1 % 60 min.
tuberkulicidinis	2 % 30 min.
efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu įsk. Hepatito B virusą/ŽIV/Hepatito C virusą	3 % 15 min.
Veikliųjų medžiagų 100 g	3.6 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamine

VAH/DGHH

CE 0482



be aldehydų

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 L Dozavimas butelis	10	00-122-010
2 L butelis	6	00-122-020EXD
5 L bakelis	3	00-122-050EXD

PERFEKTAN® TB

instrumentų dezinfekantas

- sudėtyje nėra aldehydų, puikios valymo savybės
- aukštas medžiagų suderinamumas
- malonus kvapas

PERFEKTAN® TB yra instrumentų dezinfekavimo priemonė kasdieniniam naudojimui medicinos aplinkoje. Produktas yra ekonomiškai ir sujungia aukštą medžiagų suderinamumą su puikiomis valymo savybėmis. stiprus antimikrobinis poveikis užtikrina asmenų apsaugą instrumentų apdorojimo metu. Kadangi priemonės sudėtyje nėra aldehydų, Perfektan® TB yra malonaus kvapo ir gali būti naudojamas su visų rūšių medicinos instrumentais.

Antimikrobinės savybės	Naudojimo būdas
baktericidinis įsk. MRSA, mielicidinis pagal VAH/DGHH/EN 13624/EN 13727/EN 1276/EN 1650	Instrumentų dezinfekcija pagal Vokietijos reglamentus/VAH/DGHH: užterštomis sąlygomis: 1 % 60 min.
tuberkulicidinis	2 % 30 min.
efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu įsk. Hepatito B virusą/ŽIV/Hepatito C virusą	3 % 15 min.
efektyvus prieš Polio virusą (esant 50° C) ir Rota virusą ir Papova/Poliomos virusą	
Veikliųjų medžiagų 100 g	3.75 g Cocospopylendiaminguanidiniumdiacetate 5.63 g Didecylloxethylmethylammoniumpropionate

PERFEKTAN® extra

instrumentų dezinfekcijos priemonė

CE 0482

- be aldehydų, puikios valymo savybės
- antibakterinis ir virusidinis valymas
- aukštas medžiagų suderinamumas

PERFEKTAN® extra yra efektyvi instrumentų valymo priemonė, pasižyminti su puikiais valymo savybėmis ir aukštu medžiagų suderinamumu. PERFEKTAN® extra sudėtyje yra veiksmingų korozijos inhibitorių ir nėra aldehydų bei fenolių. Puikios valymo savybės leidžia vienu metu atlikti ir antibakterinį, ir antivirusinį instrumentų valymą. Bealdehidinė sudėtis padeda išvengti proteinų fiksacijos.



Antimikrobinės savybės	Naudojimo būdas
baktericidinis įsk. MRSA, mielicidinis pagal EN 1276/EN 1650/EN 13624/EN 13727	Antimikrobinis valymas pagal Europos standartus/ EN 1276/EN 1650/EN 13727 švariomis sąlygomis: 0.25 % 5 min.
tuberkulocidinis pagal EN 14348	
efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu įsk. Hepatito B virusą/ŽIV/Hepatito C virusą	
Veikliųjų medžiagų 100 g	5.63 g didecylloxethylmethylammoniumpropionate, cationic surfactants < 5 %, non-ionic surfactants 5 - 15 %

be aldehydų

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
2 L butelis	6	00-144-020EXP
5 L bakelis	3	00-144-050EXP

PERFEKTAN® ENDO

koncentratas be aldehydų instrumentų valymui ir dezinfekcijai

VAH/DGHM

CE 0482

- aukštas medžiagų suderinamumas
- idealiai tinka endoskopų valymui ir dezinfekavimui
- puikios valymo savybės

PERFEKTAN® ENDO yra instrumentų dezinfekavimo priemonė, pasižyminti puikiais valymo savybėmis ir aukštu medžiagų suderinamumu, grindžiamu patentuotos veikliosios medžiagos principu. PERFEKTAN® ENDO ypač tinka pirminiam instrumentų ir endoskopų valymui ir dezinfekcijai be proteinų fiksacijai, nes jo sudėtyje nėra aldehydų ir fenolių. Stiprus antimikrobinis poveikis užtikrina asmenų apsaugą instrumentų apdorojimo metu.

Medicininį instrumentų dezinfekcija. Idealiai tinka pirminiam medicininių instrumentų ir endoskopų dezinfekuojančiam valymui be proteinų fiksacijos. Tinka naudoti ultragarso vonelėse.



Išbandyti ir patvirtinti
OLYMPUS-WINTER &
IBE, WOLF

Antimikrobinės savybės	Naudojimo būdas
baktericidinis įsk. MRSA, mielicidinis pagal VAH/DGHM/EN 13624/EN 13727/EN 1276/EN 1650	Instrumentų dezinfekcija pagal Vokietijos reglamentus/VAH/DGHM: užterštomis sąlygomis: 1 % 60 min.
tuberkulocidinis	
efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu įsk. Hepatito B virusą/ŽIV/Hepatito C virusą	
efektyvus prieš Rota virusą ir Papova/Poliosomos virusą	3 % 15 min.
Veikliųjų medžiagų 100 g	3.75 g Cocosporylendiaminguanidiniumdiacetate 5.63 g Didecylloxethylmethylammoniumpropionate

be aldehydų

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 L Dozavimas butelis	10	00-121-010
2 L butelis	6	00-121-020
5 L bakelis	3	00-121-050EXP

Rankinė dezinfekcija ir valymas

VAH/DGHM

CE 0482

virusidinis per
30 min.



patvirtinta
PHILIPS
TEE-Probes

išbandyta ir patvirtinta
STORZ

virusidinis

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 L Dozavimas butelis	10	00-150-010
2 L butelis	6	00-150-020
5 L bakelis	3	00-150-050

DESCOTON extra

instrumentų ir endoskopų dezinfekantas

- virusidinis aktyvumas pagal RKI RKI/DVV reglamentus
- be formaldehido. Puikios valymo savybėmis
- aukštas medžiagų suderinamumas – tinka endoskopų apdorojimui

DESCOTON extra yra greitai veikiantis virusidinis skystas koncentratas endoskopų ir visų rūšių chirurginių instrumentų dezinfekavimui. Formaldehido neturinti formulė leidžia pasiekti ekonomišką dozavimo koncentraciją, platų veikimo spektrą, įskaitant virusidinį, tuberkulocidinį ir sporicidinį poveikį, ir aukštą medžiagų suderinamumą. DESCOTON extra idealiai tinka lanksčių ir standžių endoskopų ir visų rūšių medicininių instrumentų galutinei virusidinei dezinfekcijai.

Antimikrobinės savybės

baktericidinis įsk. MRSA, mielicidinis pagal VAH/DGHM
tuberkulocidinis
sporicidinis
efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu įsk. Hepatito B virusą/ŽIV/Hepatito C virusą
virusidinis įsk. Polio virusą/Adeno virusą/Papova/

Naudojimo būdas

Instrumentų dezinfekcija pagal Vokietijos reglamentus/VAH/DGHM: užterštomis sąlygomis: 1 % 60 min.
1.5 % 30 min.
2 % 15 min.

Veikliųjų medžiagų 100 g 12.0 g Glutaral

CE 0482



išbandyti ir patvirtinti
STORZ

paruoštas naudoti

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
5 L bakelis	3	00-135-050EXP

DESCOTON 2 % GDA

paruoštas naudoti instrumentų ir endoskopų dezinfekantas

- gliutaraldehido pagrindu
- švelnus medžiagoms – tinka endoskopų apdorojimui
- greitai veikia

DESCOTON 2 % GDA yra paruoštas naudoti produktas veikliosios medžiagos gliutaraldehido pagrindu. Tinka medicininių instrumentų, įskaitant lanksčius ir standžius endoskopus, dezinfekavimui.

Antimikrobinės savybės

baktericidinis įsk. MRSA, mielicidinis pagal VAH/DGHM/EN 13727/EN 13624
tuberkulocidinis pagal EN 14348
sporicidinis (Clostridium difficile)
efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu įsk. Hepatito B virusą/ŽIV/Hepatito C virusą

Naudojimo būdas

Instrumentų dezinfekcija pagal Vokietijos reglamentus/VAH/DGHM: užterštomis sąlygomis: 5 min.

Veikliųjų medžiagų 100 g 2.0 g Glutaral

DESCOTON forte

veiksmingas instrumentų ir endoskopų dezinfekantas

VAH/DGHM

RKI A

CE 0482

- virusidinis pagal RKI/DVV reglamentus
- aukštas medžiagų suderinamumas - tinka endoskopų apdorojimui
- įtrauktas į RKI, dezinfekantų naudojamų epidemijos atvejais, sąrašą

DESCOTON forte yra labai efektyvus virusidinis skystas koncentratas endoskopų ir visų rūšių chirurginių instrumentų dezinfekcijai.

DESCOTON forte yra ekonomišką ir leidžia pasiekti platų veikimo spektrą, įskaitant virusidinį, tuberkulocidinį ir sporicidinį poveikį, bei aukštą medžiagų suderinamumą. Idealiai tinka visų rūšių medicininių instrumentų galutinei dezinfekcijai.



išbandyta ir patvirtinta
PENTAX, STORZ,
OLYMPUS-WINTER &
IBE, WOLF

patvirtinta
HETTICH
Zentrifugen

Antimikrobinės savybės	Naudojimo būdas
baktericidinis įsk. MRSA, mielicidinis pagal VAH/DGHM	Instrumentų dezinfekcija pagal Vokietijos reglamentus/VAH/DGHM: užterštomis sąlygomis: 2 % 60 min.
tuberkulocidinis pagal EN 14348/EN 14563	
sporicidinis	
efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu įsk. Hepatito B virusą/ŽIV/Hepatito C virusą	3 % 15 min.
virusidinis, įsk. Polio virusą/Adeno virusą/Papova/Poliomos virusą/Hepatito A virusą	
Veikliųjų medžiagų 100 g 7.6 g formaldehido, 4.5 g Glutaral	

virusidinis

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 L	Dozavimo butelis	10 00-101-010
2 L	butelis	6 00-101-020
5 L	bakelis	3 00-101-050

Rankinis instrumentų apdorojimas

Rankinis instrumentų valymas ir cheminė dezinfekcija

Norint užtikrinti puikius chirurginių instrumentų dezinfekavimo rezultatus, būtina jų apdorojimui naudoti patikimo efektyvumo dezinfekcijos produktus su plačiu veikimo spektru ir geromis valymo savybėmis.

Be aukštos produktų kokybės optimalios higienos pagrindą sudaro ir nuoseklus medicininių įrenginių valymo ir dezinfekcijos procedūrų laikymasis. Norėdami sužinoti daugiau apie būtinas procedūras, skaitykite mūsų brošiūrą „Nurodymai - Rankinis instrumentų valymas ir cheminė dezinfekcija“, kurioje, vadovaujantis DGSV (Vokietijos sterilizavimo medžiagų tiekimo asociacijos), o taip pat RKI (Robert Koch Instituto) rekomendacijomis, paaiškintas instrumentų apdorojimo ciklas.



Medicinos prietaisų valymas

DIN EN ISO 17664 standartas apibūdina valymą kaip dėmių pašalinimą nuo objekto iki lygio, kuris reikalingas tolesniam apdorojimui arba naudojimui pagal paskirtį.

Efektyvus medicinos prietaisų valymas yra būtina veiksmingos dezinfekcijos ir, jei reikia, vėlesnės sterilizacijos sąlyga.


Rankinis valymas yra atliekamas tinkamomis valymo medžiagomis, kurios skiriasi savo ingredientais (aktyviosiomis paviršiaus medžiagomis, enzimais ir dezinfekantais) ir jų pH reikšme (nedaug šarminis, labai šarminis ir pH-neutralus).

Medicinos prietaisų valymas gali būti atliekamas su valymo priedais, pvz. šepetėliais.

Svarbu užtikrinti, kad valymo priedai nesugadintų instrumentų, pvz. metaliniai šepetėliai nesubraižytų instrumentų paviršiaus. Tuščiavidurių instrumentų valymui reikalaujama, kad gamintojas pasiūlytų tinkamus šepetėlius arba pateiktų informaciją apie tinkamų šepetėlių skersmenį ir ilgį.

Priimtinesni yra sterilizuojami arba vienkartiniai valymo priedai. Siekiant išvengti užteršimo potencialiai infekuotomis medžiagomis, medicinos

prietaisų valymui neturi būti naudojama stipri vandens srovė. Jeigu valymui yra naudojami šepetėliai, tai valyti galima tik panardinus rankas į skystį, kad būtų išvengta apsitaisymo rizikos. Valymui taip pat gali būti naudojamos ultragarso vonelės.

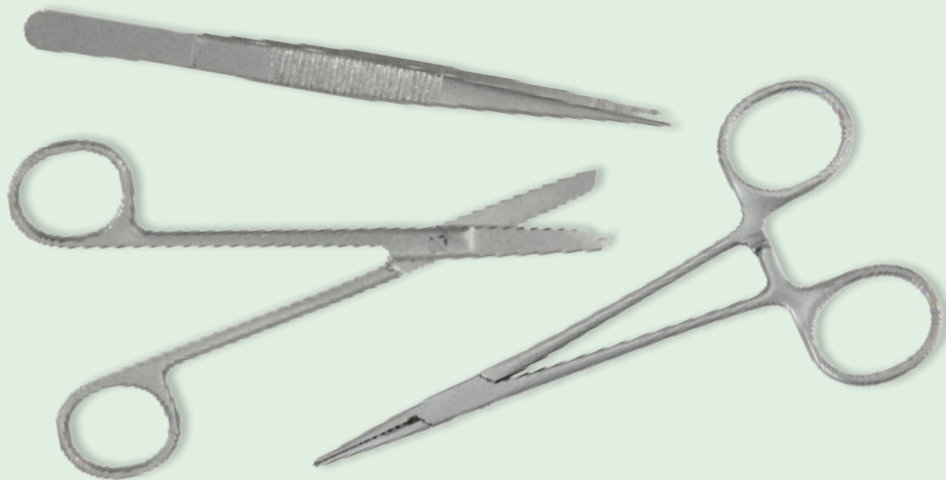

DESCO CLEANER

instrumentų valymo milteliai

- puikios valymo savybės
- ypač tinka valymo procedūroms su ultragarsu
- greitai veikia

DESCO CLEANER yra šarminiai valymo milteliai greitam ir ypač kruopščiam instrumentų ir medicininių prietaisų, pagamintų iš metalo, sintetinės medžiagos, keramikos, stiklo ir porceliano, savaiminiam valymui. Tais atvejais, kai mediciniai instrumentai yra užteršti krauju ar baltymais, DESCO CLEANER yra idealus produktas, padedantis užtikrinti tinkamą instrumentų valymą visose medicinos srityse ir laboratorijose. Tinka naudoti ultragarso vonelėse.

valymo milteliai

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 kg dėžutė	6	00-115-010
5 kg kibirėlis	1	00-115-050

Naudojimo būdas

priklausomai nuo mikroorganizmų lygio 0.5 % - 1 %



PLURAZYME® extra

trijų enzimų valiklis chirurginių instrumentų ir endoskopų apdorojimui

- puikios valymo savybės
- ekonomiškai naudojamas koncentratas
- idealiai tinka valymui ultragarsu
- puikus medžiagų suderinamumas

PLURAZYME® extra puikiai suderinamas su įvairiomis medžiagomis, todėl yra idealus valymo koncentratas rankiniam chirurginių instrumentų ir lanksčių endoskopų apdorojimui. Jis yra ekonomiškas ir rekomenduojamas naudoti ultragarso vonelėse. PLURAZYME® extra sudėtyje esančios nejoninės paviršių aktyviosios medžiagos ir stabilizuotas trijų enzimų kompleksas užtikrina puikų valymą. Savaiminio veikimo formulės neutralizuoja, įsiskverbia ir efektyviai pašalina visus organinius teršalus, tokius kaip baltymai, kraujas, gleivės, vėmalai, riebalai ir išmatos, net ir sunkiai pasiekiamose vietose.



Naudojimo būdas

Instrumentų ir endoskopų valymas

Dozavimas: 0.25 % - 0.4 % Ekspozicijos laikas: 5 min.

Vienetas

Kiekis Partijos Nr.

1 l	butelis	12	00-138-010EXP
5 l	bakelis	3	00-138-050EXP

INSTRU PLUS

skystas instrumentų ir endoskopų valiklis

- aukštas medžiagų suderinamumas – tinka endoskopams
- papildomas valiklis instrumentų dezinfekcijai
- suderinama su visais instrumentų dezinfekantais

INSTRU PLUS yra neutralaus pH valiklis greitam ir švelniam instrumentų ir endoskopų, o taip pat medicinos prietaisų, pagamintų iš metalo, plastiko, keramikos, stiklo, gumos ir porceliano, valymui. Jis naudojamas kartu su instrumentų dezinfekantais. INSTRU PLUS sudėtyje yra efektyvių korozijos inhibitorių, todėl jis pasižymi aukštu medžiagų suderinamumu. Kadangi valiklio pH yra neutralaus, INSTRU PLUS ypač tinka švelniam siauro spindžio instrumentų, kaip pavyzdžiui, endoskopų valymui. INSTRU PLUS – idealiai tinka kaip papildomas valiklis kartu su instrumentų dezinfekantais. PERFEKTAN ENDO, PERFEKTAN NEU, PERFEKTAN TB, DESCOTON forte, DESCOTON % 2 GDA IR DESCOTON extra. INSTRU PLUS ypač tinka ultragarsinėms valymo ir dezinfekavimo procedūroms.



PENTAX -
išvardyti

išbandyta ir patvirtinta
STORZ

Naudojimo būdas

Instrumentų ir endoskopų valymas

Dozavimas: 0.25 % Ekspozicijos laikas: 2 - 15 min.

pH-neutralus

Vienetas

Kiekis Partijos Nr.

2 L	butelis	6	00-104-020EXD
5 L	bakelis	3	00-104-050EXD

Automatinis apdorojimas

THERMOTON® visuose dezinfekcijos etapuose



Norint standartizuoti valymo ir dezinfekcijos procesus, geriausia naudoti automatizuotą procedūrą. Esminis etapas, užtikrinantis veiksmingą dezinfekciją/sterilizaciją, yra pirminis instrumentų, kurie vėliau turi būti dezinfekuojami, valymas. Mūsų Thermoton® produktų grupėje yra visi skirtingiems dezinfekcijos etapams naudojami produktai.

THERMOTON®



		NR	DEZINFEKANTAS	N
Taikymas	valiklis	•		
	dezinfekantas		•	
	skalavimo skystis			
	neutralizuojantis ploviklis			•
Taikymo sritis	endoskopai	•	•	
	instrumentai	•		•
Savybės	veikiantis prionus			
	šarminis			
	be QAC (ketvirtinių amonio junginių)	•		•
	be chloro	•	•	•
	švelnios medžiagos	•	•	○
	pH-neutralus	•		
	mažai putoja	•	•	•
	be formaldehido	•	•	•
Temperatūros diapazonas	< 60° C cheminis-šiluminis procesas	•	•	
	> 60° C šiluminis procesas	•		•
Pakuotės*		5 L	5 L	5 L

* didesni dydžiai pagal užsakymą

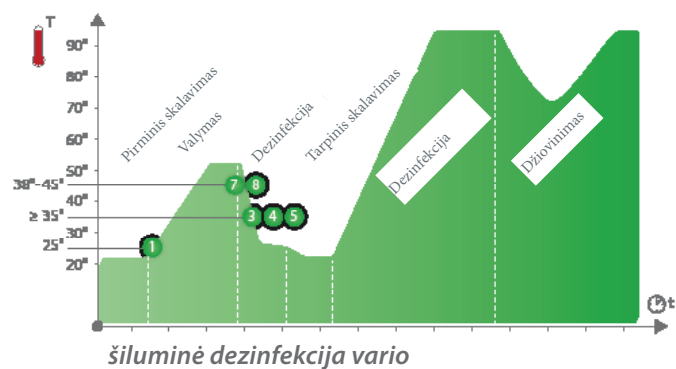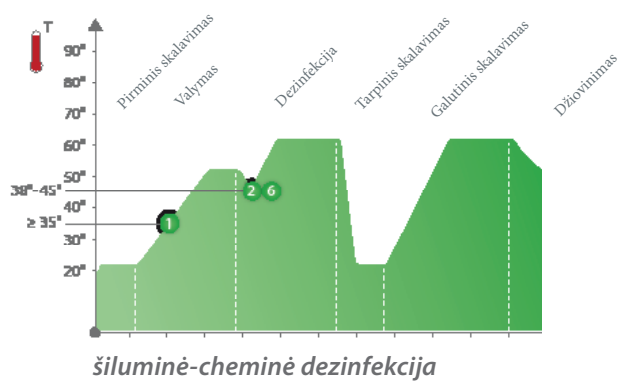

	CLEAR	NKB	BG	CLEANER	AP
Taikymas				•	•
			•		
	•	•			
	•				
Taikymo sritis					
	•	•	•	•	•
Savybės				•	•
			•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	○	•	•	○	○
		•			
	•	•	•	•	•
	•	•		•	•
Temperatūros diapazonas		•	•		
	•	•		•	
Pakuotės*	5 L	5 L	5 L	5 L	10 kg

• = tikslu ○ = dalinai tikslu

CE



THERMO CLEAR

skaidrus ploviklis terminėms basonų plovimo mašinoms

- apsaugo basonų plovimo mašinas kalkių nuosėdų
- džiūdamas ant basonų paviršiaus nepalieka dėmių
- mažai putoja

rūgštinis pH

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
5 L bakelis	3	00-127-050

THERMO CLEAR ploviklis yra skirtas chemo-terminiam basonų plovimui ir dezinfekcijai plovimo mašinose. Džiūdamas ši medžiaga nepalieka dėmių ant basonų paviršių bei apsaugo plovimo mašinas nuo kalkių nuosėdų, o taip pat mažai putoja. Sukurtas citrinos rūgšties pagrindu, THERMO CLEAR yra biologiškai suyantis, kaip to reikalauja ES reglamentas detergentams.

CE



THERMO ALKA CLEAR

skaidrus šarminis ploviklis terminėms basonų plovimo mašinoms

- apsaugo basonų plovimo mašinas nuo kalkių nuosėdų
- džiūdamas ant basonų paviršiaus nepalieka dėmių
- labai mažai putoja

šarminis

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
4,25 L bakelis	3	00-137-050

THERMO ALKA CLEAR ploviklis yra skirtas chemo-terminiam basonų plovimui ir dezinfekcijai plovimo mašinose. Tinka visų tipų basonams ir yra patvirtintas tokių basonų gamintojų, kaip Arjo, Getinge, ZK Kulimat ir Kodra. THERMO ALKA CLEAR ploviklis džiūdamas nepalieka dėmių ant basonų paviršių bei apsaugo plovimo mašinas nuo kalkių nuosėdų, o taip pat labai mažai putoja.



Basonų plovimo mašinų higiena

Basonai ir pisuarai gali tapti mikroorganizmų, ypač tokių patogenų, kurie sukelia gastroenteritą, nešėjais. Todėl slaugos priemonių priežiūra yra labai svarbi. Kadangi automatinis basonų valymas yra efektyvesnis nei rankinis, šiam apdorojimo būdai teikiama pirmenybė.

Reguliavimo institucijos ir visuomenės sveikatos biurai rekomenduoja tikrinti basonų plovimo įrangą kasmet (jeigu ji yra naudojama tik slaugos įranginių plovimui) arba kas šešis mėnesius (jeigu ji naudojama ir kitiems medicininiams prietaisams). Terminės basonų plovimo mašinos paprastai yra tikrinamos duomenų arba terminių registratorių pagalba, o chemo-terminė įranga tikrinama naudojant biologinių indikatorių pagalba.

Visuomenės sveikatos biurai mielai suteiks Jums išsamesnę informaciją.

SPEZIAL ÖLSPRAY

purškiama instrumentų priežiūros priemonė

- medicininių baltųjų alyvų pagrindu
- instrumentų priežiūrai prieš sterilizaciją garais
- optimalus instrumentų judančių dalių suteipimas

SPEZIAL ÖLSPRAY yra aerosolinė priemonė medicininių instrumentų priežiūrai, ypač šarnyrinių instrumentų, bei įvairių plieninių įrenginių, pvz., turbinų, lankstų, vienalyčių ir lanksčių instrumentų, priežiūrai. Ji sudaro ant plieno paviršių ploną apsauginį sluoksnį, užtikrinantį optimalų judančių instrumentų dalių suteipimą ir veiksmingą apsaugą nuo korozijos sterilizacijos garais metu. SPEZIAL ÖLSPRAY gali būti naudojamas ir standžių endoskopų vožtuvų priežiūrai.



CE

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
500 ml aerosolinis purškiklis	12	00-108-005EXD

SILIKONSPRAY

purškiama instrumentų priežiūros priemonė

- medicininės silikono alyvos pagrindu
- instrumentų priežiūrai prieš sterilizaciją karštu oru
- optimalus instrumentų judančių dalių suteipimas

SILIKONSPRAY yra aerosolinė priemonė medicininių instrumentų, pagamintų iš visų rūšių plieno, priežiūrai, ypač šarnyrinių instrumentų, bei įvairių plieninių įrenginių, pvz., turbinų, lankstų, vienalyčių ir lanksčių instrumentų, priežiūrai. Ji sudaro ant plieno paviršių ploną apsauginį sluoksnį, užtikrinantį optimalų judančių instrumentų dalių suteipimą ir veiksmingą apsaugą nuo korozijos sterilizacijos karštu oru metu. SILIKONSPRAY taip pat gali būti naudojamas lanksčių endoskopų vožtuvų priežiūrai.



CE

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
500 ml aerosolinis purškiklis	12	00-107-005

INSTRUMENTENMILCH

emulsija instrumentų priežiūrai

- medicininių baltųjų alyvų pagrindu
- instrumentų priežiūrai prieš sterilizaciją garais
- optimalus instrumentų judančių dalių suteipimas

INSTRUMENTENMILCH tinka visų rūšių metalinių instrumentų priežiūrai medicinos ir odontologijos srityse. Produktas sudaro ploną apsauginį sluoksnį ant instrumentų paviršių ir užtikrina optimalų judančių instrumentų dalių suteipimą garų sterilizacijos metu. Produktas naudojamas mirkant arba automatinėse plovimo mašinose.



CE

Dozavimas/Ekspozicijos kartai

naudojimas plovimo mašinose 0.3 g/l

Rankinis naudojimas (mirkant)

3 %

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
5 L bakelis	3	00-106-050EXP

Paviršiai

Paviršiai

48-53

Dezinfekanto koncentratai

54-61

Greita dezinfekcija

62-65

Dezinfekcijos servetėlių sistemos

Paviršiai

*Koncentratai, greita dezinfekcija,
servetėlių dozatoriaus sistemos*

Paviršiai

Koncentratai, greita dezinfekcija, dezinfekcijos servetėlės ir sistemos

Paviršių dezinfekcija ir valymas atlieka labai svarbų vaidmenį, užtikrinant, kad medicinos įstaigos (ligoninės, medicinos klinikos ir slaugos namai) bei maisto pramonės įmonės atitiktų higienos standartų keliamus reikalavimus.

Mes siūlome greitai veikiančių produktų asortimentą kombinuotam valymui ir dezinfekcijai, užtikrinantį puikias valymo savybes ir aukštą medžiagų suderinamumą. Dėl plataus veikimo spektro mūsų produktai gali būti naudojami ir didelės rizikos zonose.

	Taikymo sritis			Produkto savybės			Veiklosios medžiagos			Veiklos spektras							Sąrašas		Produkto tipas	
	drėgno valymo dezinfekcija	greita dezinfekcija	valymas	alkoholinis	bealkoholinis	bekvapis	peracto rūgštis	ketvirtiniai amonio junginiai	aldehidai	alkilaminas	baktericidinis	mielicidinis (C. albicans)	tuberkulocidinis	sporidinis	efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu	virusidinis	VAH	RKI	koncentratas	paruoštas naudoti
ULTRASOL® active	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ULTRASOL AF	✓		✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓		✓				✓	
CLEANISEPT	✓	✓	✓		✓	✓		✓			✓	✓			✓		✓		✓	
BIGUANID FLÄCHE N	✓	✓	✓		✓			✓			✓	✓	✓		✓		✓		✓	
OPTISAL N	✓		✓		✓					✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	
OPTISEPT	✓		✓		✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
NAUJA OPTISAL PLUS	✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	
NAUJA DESCOSEPT forte	✓	✓	✓	✓		✓					✓	✓	✓			✓	✓			✓
DESCOSEPT pur	✓	✓	✓	✓		✓					✓	✓	✓		✓		✓			✓
DESCOSEPT AF	✓	✓	✓	✓				✓			✓	✓	✓		✓		✓			✓
DESCOSEPT RF	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓		✓					✓
DESCOSEPT spezial	✓	✓	✓		✓	✓		✓			✓	✓			✓		✓			✓
DESCOSEPT spezial WIPES	✓	✓	✓		✓	✓		✓			✓	✓			✓		✓			✓
CLEANISEPT WIPES / MAXI	✓	✓	✓		✓	✓		✓			✓	✓			✓		✓			✓
CLEANISEPT WIPES forte	✓	✓	✓		✓	✓		✓			✓	✓		✓		✓	✓			✓
NAUJA DESCOSEPT PUR WIPES RTU	✓	✓	✓	✓		✓					✓	✓	✓		✓		✓			✓
NAUJA DESCOSEPT SENSITIVE WIPES	✓	✓	✓	✓		✓					✓	✓	✓		✓		✓			✓
DESCOSEPT AF WIPES	✓	✓	✓	✓				✓			✓	✓	✓		✓		✓			✓

ULTRASOL® active

*koncentruotos granulės paviršių dezinfekcijai
peracto rūgšties pagrindu*

- platus veikimo spektras
- geresnės valymo savybės
- puikus medžiagų suderinamumas

Produkto savybės

Aukšto efektyvumo koncentruotos granulės visų tipų paviršių dezinfekavimui ir valymui. ULTRASOL® active yra mažai dulkantys milteliai, todėl juos galima ypač paprastai ir saugiai dozuoti.

ULTRASOL® active yra efektyviausias dėl veikliosios medžiagos peracto rūgšties sukuriamos in situ, švelniame šarminiame tirpale. Šis produktas užtikrina puikias valymo savybes ir aukštą medžiagų suderinamumą.

ULTRASOL® active efektyvumas yra pasiekiamas net esant dideliame organiniam užteršimui; lengvai ir saugiai gali būti pašalinamas pridžiūvęs kraujas. Šis bekvapis produktas ypač tinka dezinfekcijai tose zonose, kur reikalingas maksimalus efektyvumas ir išskirtinė valymo kokybė.

Paskirtis

Pagal MDD (Medicinos prietaisų direktyvą): neinvazinių medicininių prietaisų valymas ir dezinfekcija.

Pagal Biocidinių produktų reglamentą: paviršių ir inventoriaus dezinfekavimas ir valymas medicinos, pramonės, privačiame ir viešame sektoriuose.

Antimikrobinės savybės

ULTRASOL® active:

- baktericidinis (įsk. MRSA)
- tuberkulocidinis
- mielicidinis
- fungicidinis
- virusidinis pagal RKI recommendations
- sporicidinis

Paviršiaus dezinfekcija per
5 min.
(pagal RKI)

Sudėtis

Veiklioji medžiaga:

Peracto rūgštis (in-situ) > 750 mg/L (1% tirpalas)

Taikymas

Darbinio tirpalo (0.5 %) paruošimas pagal dozavimo lentelę: paimkite 4L vandens (apie 20 °C) ir įdėkite matavimo šaukštelį miltelių (20 g). Per 15 min., retkarčiais pamaišant, veikliosios medžiagos peracto rūgšties formavimasis bus baigtas ir tirpalas paruoštas naudojimui. Tolygiai paskirstykite tirpalą ir kruopščiai nuvalykite paviršių. Naudokite asmenines apsaugos priemones. Po naudojimo nuskalaukite įrangą vandeniu.

Sąrašai/Produkto statusas

Įtrauktas į DGHM/VAH paviršiaus dezinfekantų sąrašą.

Įtrauktas į ÖGHMP paviršiaus dezinfekantų sąrašą.

Įtrauktas į IHO virusidinių dezinfekantų sąrašą.

VAH/DGHM

RKI AB

ÖGHMP

IHO

CE 0482



(www.iho-viruzidie-liste.de).

Įtrauktas į RKI dezinfekantų epidemijų atvejais sąrašą, veiksmingumo sektoriuje AB.

Įregistruotas BAuA

(Vokietijos federalinis profesinės saugos ir sveikatos institutas) kaip biocidinis produktas: baua Reg. Nr.:

N-52958

Atitinka 93/42/EB medicinos prietaisų direktyvos reikalavimus.

Tik profesionaliam naudojimui.

Dezinfekantų koncentratai



Pakuotės

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
20 g maišelis	100	00-255-0002
1 kg kibirėlis (įsk. matavimo šaukštą)	6	00-255-010

	0.5 %	1.0 %
4 litrai	1 x 20 g	2 x 20 g
4 litrai	1 x 20 g	2 x 20 g
8 litrai	2 x 20 g	4 x 20 g
8 litrai	2 x 20 g	4 x 20 g
	1 x = 20 g	1 x = 20 g

Dozavimas ir ekspozicijos laikas

Antimikrobinės savybės	1 min.	5 min.	10 min.	15 min.	30 min.	60 min.
paviršiaus dezinfekcija (baktericidinis, mielicidinis) pagal VAH sąrašą	švariomis sąlygomis	1.0 %		0.5 %		
	užterštos sąlygos				1.0 %	0.5 %
Virusidinis	pagal RKI/DVV				1.5 %	1.0 %
	Polio virusas				1.5 %	1.0 %
	Adeno virusas			0.5 %		
	Poliomos virusas/SV 40		1.0 %	0.5 %		
	Vaccinia virusas	0.25 %				
	Noro virusas (EN 14476)		0.5 %			
Sporicidinis (C. difficile)	pagal EN 13704			2.0 %	1.0 %	0.5 %

Antimikrobinės savybės	1 min.	5 min.	10 min.	15 min.	30 min.	60 min.
EN 13727	baktericidinis, didelis organinis	1.0 %	0.5 %			
EN 14348	mielicidinis, didelis organinis					1.0 %
EN 13624	sporicidinis	1.0 %	0.5 %			
EN 13624 (A.brasiliensis)	fungicidinis, high soiling					1.0 %
EN 13704 (C.difficile)	sporicidinis			2.0 %	1.0 %	0.5 %

CE 0482



ULTRASOL® AF

skystas koncentratas paviršių valymui ir dezinfekcijai

- puikios valymo savybės
- baktericidinis, mielicidinis, tuberkulocidinis
- be kvapiųjų medžiagų

ULTRASOL AF yra patogiai naudojamas koncentratas medicinos prietaisų, medicinos inventoriaus ir visų rūšių paviršių dezinfekcijai ir valymui. Labai geros valymo savybės.

Be to, jo sudėtyje nėra nei aldehydų, nei fenolių. ULTRASOL AF rekomenduojama naudoti visų rūšių paviršių, įskaitant organinį stiklą, valymui ir dezinfekcijai. Tačiau jis netinka spalvotiems metalams ir polikarbonatams.

be aldehydų

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 l butelis	12	00-204AF-010EXP
5 l bakelis	3	00-204AF-050

Antimikrobinės savybės	Naudojimo būdas
baktericidinis įsk. MRSA, mielicidinis pagal EN 1040/EN 1275/EN 13624/EN 13727/EN 13697 tuberkulocidinis pagal EN 14348 efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu įsk. Hepatito B virusą/ŽIV/Hepatito C virusą ir Vaccinia virusą pagal EN 14476	Paviršiaus dezinfekcija pagal Europos standartus/EN 13697: švariomis sąlygomis: 0.25 % 15 min.
Veikliųjų medžiagų 100 g	3.33 g Benzylalkyldimethylammoniumchloride 3.33 g benzilo alkilo dimetil amonio chlorido 1.68 g didecil dimetil amonio chlorido 1.1 g N-(3-aminopropilo)-N-dodecil propano-1,3-diamino

Saugiai naudokite dezinfekavimo priemones. Prieš pradėdami naudoti visada perskaitykite etiketę ir produkto informaciją.

Kas yra ketvirtiniai amonio junginiai (QAC)?

QAC yra ketvirtinių amonio junginių trumpinys. Dažniausiai jie yra vadinami tiesiog „quats“.

Beveik visi dezinfekantų gamintojai ketvirtinius amonio junginius savo produktuose naudoja kaip bealdehidinius aktyvius ingredientus. Ši veikliųjų medžiagų grupė pasižymi geromis valymo savybėmis, labai mažu toksiškumu ir lakumu. Todėl ketvirtinių amonio junginių pagrindu sukurti mišiniai yra beveik bekvapiai, ypač lyginant su junginiais, kurių sudėtyje yra aldehydų.

Kadangi ketvirtiniai amonio junginiai beveik nelakūs, jie, naudojami ilgesnį laiką, gali sudaryti kristalinį sluoksnį ant dezinfekuojamo paviršiaus. Šis sluoksnis turi būti reguliariai pašalinamas nejoninių tenzidų pagrindu pagamintais valikliais, kitaip paviršiai gali pasidaryti lipnūs.



Naudojant paviršiaus dezinfekantus gali pasireikšti lipnumo poveikis.

CLEANISEPT®

skystas koncentratas paviršių valymui ir dezinfekcijai

- be aldehydų su geromis valymo savybėmis
- tinka dezinfekcijai maisto zonose
- be kvapiųjų medžiagų

CLEANISEPT® yra skystas koncentratas, be aldehydų ir fenolių, skirtas medicinos inventoriaus, medicinos prietaisų, tokių kaip inkubatoriai, ir visų rūšių paviršių dezinfekavimui ir valymui. CLEANISEPT® galima naudoti kaip bealkoholinį dezinfekantą greitai paviršių dezinfekcijai, o taip pat ir akrilinio stiklo paviršių dezinfekcijai ir valymui. Produktas idealiai tinka naudoti visose maisto pramonės srityse ir valgyklų virtuvėse. CLEANISEPT® naudojimas yra labai patogus, nes jis gerai pašalina riebalus ir yra be kvapiklių.



VAH/DGHM

IHO

ÖGHMP

CE 0482

Antimikrobinės savybės	Naudojimo būdas
baktericidinis įsk. MRSA, mielicidinis pagal VAH/DGHM/EN 1276/EN 1650	Paviršiaus dezinfekcija pagal Europos standartus/EN 13697:
efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu įsk. Hepatito B virusą/ŽIV/Hepatito C virusą	švariomis sąlygomis: 0.5 % 5 min.
efektyvus prieš Rota virusą ir Papova/Poliomos virusą pagal EN 14476	užterštomis sąlygomis: 0.75 % 5 min.
	pagal Vokietijos reglamentus/VAH/DGHM:
	užterštomis sąlygomis: 1 % 60 min.
	2.5 % 15 min.
	7.5 % 1 min.
Veikliųjų medžiagų 100 g	3.33 g didecil dimetil amonio chlorido 6.66 g benzilo alkilo dimetil amonio chlorido

be aldehydų

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 L Dozavimas butelis	10	00-204-010EXD
2 L butelis	6	00-204-020EXD
5 L bakelis	3	00-204-050EXD
10 L bakelis	1	00-204-100EXD

Saugiai naudokite dezinfekavimo priemones. Prieš pradėdami naudoti visada perskaitykite etiketę ir produkto informaciją.

BIGUANID FLÄCHE N

skystas koncentratas paviršių dezinfekavimui ir valymui

- be aldehydų su geromis valymo savybėmis
- tuberkulocidinis, efektyvus prieš Noro virusą
- malonaus kvapo

BIGUANID FLÄCHE N yra koncentratas, kurio sudėtyje nėra aldehydų ir fenolių, skirtas medicinos prietaisų, tame tarpe kvėpavimo kaukių ir inkubatorių, medicinos inventoriaus, ir visų rūšių paviršių valymui ir dezinfekcijai. Jį galima naudoti kaip bealkoholinį dezinfekantą greitai paviršių dezinfekcijai, pvz. vonių dezinfekavimui. BIGUANID FLÄCHE N tinka naudoti dezinfekavimo tikslais visose maisto pramonės srityse ir valgyklų virtuvėse. Produktas yra efektyvus prieš virusus, įskaitant Noro virusus, ir yra tuberkulocidinis. Sertifikuotas ir išbandytas pagal VAH/DGHM, o taip pat ÖGHMP direktyvas.



VAH/DGHM

IHO

ÖGHMP

CE 0482

Antimikrobinės savybės	Naudojimo būdas
baktericidinis įsk. MRSA, mielicidinis pagal VAH/DGHM/EN 1276/EN 1650/EN 13697	Paviršiaus dezinfekcija pagal Europos standartus/EN 13697:
tuberkulocidinis	švariomis sąlygomis: 0.5 % 5 min.
efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu įsk. Hepatito B virusą/ŽIV/Hepatito C virusą	užterštomis sąlygomis: 0.75 % 5 min.
efektyvus prieš Rota virusą / Papova/Poliomos virusą/Adeno virusą ir Noro virusą (MNV) pagal EN 14476	pagal Vokietijos reglamentus/VAH/DGHM:
	užterštomis sąlygomis: 0.5 % 30 min.
	1 % 5 min.
Veikliųjų medžiagų 100 g	16,0 g benzilo alkilo dimetil amonio chlorido

be aldehydų

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
40 ml maišelis	200	00-201-0004
1 L Dozavimas butelis	10	00-201-010
2 L butelis	6	00-201-020
5 L bakelis	3	00-201-050
10 L bakelis	1	00-201-100

Saugiai naudokite dezinfekavimo priemones. Prieš pradėdami naudoti visada perskaitykite etiketę ir produkto informaciją.

Dezinfekantų koncentratai

VAH/DGHH

ÖGHMP

CE 0482



OPTISAL® N

skystas koncentratas paviršių valymui ir dezinfekcijai

- preparatas be aldehydų su išskirtinėmis valymo savybėmis
- jokio lipnumo, nes sudėtyje nėra ketvirtinių amonio junginių
- malonaus ir gaivaus kvapo

OPTISAL® N yra labai patogiai naudojamas skystas koncentratas medicinos prietaisų, medicinos inventoriaus ir visų rūšių paviršių valymui ir dezinfekcijai. Produktas pasižymi išskirtinėmis valymo savybėmis. Kadangi jo sudėtyje nėra nei aldehydų, nei fenolių, jis gaiviai ir maloniai kvepia. Kadangi ketvirtinių amonio junginių taip pat nėra sudėtyje, išvengiama apdorojamų paviršių lipnumo.

be aldehydų

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 L Dozavimas butelis	10	00-214-010
5 L bakelis	3	00-214-050

Antimikrobinės savybės	Naudojimo būdas
baktericidinis įsk. MRSA, mielicidinis pagal VAH/DGHH/EN 13624/EN 13727 tuberkulocidinis pagal EN 14348 efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu įsk. Hepatito B virusą/ŽIV/Hepatito C virusą ir Vaccinia virus pagal EN 14476	Paviršiaus dezinfekcija pagal Vokietijos reglamentus /VAH/DGHH: užterštomis sąlygomis: 1 % 15 min. 0.5 % 60 min.
Veikliųjų medžiagų 100 g	7.2 g N-(3-amino propilo)-N-dodecil propano-1,3-diamino

Saugiai naudokite dezinfekavimo priemones. Prieš pradėdami naudoti visada perskaitykite etiketę ir produkto informaciją.

VAH/DGHH

ÖGHMP

RKI AB

CE 0482



OPTISEPT®

skystas koncentratas paviršių valymui ir dezinfekcijai

- itin platus veikimo spektras, įtrauktas į RKI sąrašą sektoriui A ir B
- virusidinis, įsk. Noro virusą
- įprastai dezinfekcijai ir dezinfekcijos tikslais epidemijų metu

OPTISEPT® yra labai efektyvus skystas koncentratas kombinuotam medicinos inventoriaus, medicinos prietaisų ir visų rūšių paviršių dezinfekavimui ir valymui. Produktas yra visapusiškai veiksmingas ir yra sertifikuotas bakterijų, grybelių (sektorius A) ir virusų (sektorius B) epidemijų metu dezinfekcijos tikslais pagal RKI (Robert Koch institutas, Vokietijos federalinis ligų kontrolės ir prevencijos institutas) reikalavimus.

virusidinis

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 L Dozavimas butelis	10	00-205-010
5 L bakelis	3	00-205-050

Antimikrobinės savybės	Naudojimo būdas
baktericidinis įsk. MRSA, mielicidinis pagal VAH/DGHH tuberkulocidinis pagal EN 14348 efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu įsk. Hepatito B virusą/ŽIV/Hepatito C virusą virusidinis įsk. Polio/Adeno/Papova/Poliomos/ Parvo/Noro virus sporicidinis pagal EN 13704	Paviršiaus dezinfekcija pagal Vokietijos reglamentus /VAH/DGHH: užterštomis sąlygomis: 2 % 15 min. 1 % 30 min. 0.5 % 60 min.
Veikliųjų medžiagų 100 g	3.5 g formaldehido, 9.6 g glioksilo, 2.5 g Glutaraldehido, 8.0 g Didecildimetilamono chlorido

NAUJA

OPTISAL® PLUS

skystas koncentratas paviršių valymui ir dezinfekcijai

- platus veikimo spektras
- puikios valomosios savybės
- puikus medžiagų suderinamumas

VAH/DGHM

ÖGHMP

IHO

CE 0482

Produkto savybės

OPTISAL® PLUS yra skystas koncentratas šalia paciento esančių paviršių, o taip pat neinvazinių medicinos prietaisų dezinfekavimui ir valymui. Produktas gali būti naudojamas visų paviršių medicinos srityse dezinfekcijai ir valymui. **OPTISAL® PLUS** puikiai valo ir jo veikimo spektras yra pritaikytas rutininiam naudojimui. Be to, kad jis yra efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu (HBV, ŽIV, HCV), **OPTISAL® PLUS** yra labai efektyvus ir prieš virusus be apvalkalo, tokius kaip Adeno virusas, Noro virusas ir Rota virusas. **OPTISAL® PLUS** taip pat efektyviai veikia mikrobakterijas ir grybelius. Jo naujoviška sudėtis užtikrina džiuvinimą be dūmių. **OPTISAL® PLUS** yra bekvapis ir be aromato.

Paskirtis

Pagal MDD (Medicininį įrenginių direktyvą): neinvazinių medicinos įrenginių dezinfekcija ir valymas. Pagal ES Biocidinių produktų reglamentą (BPR): paviršių ir įrangos dezinfekcija ir valymas medicinos, pramonės, privataus ir viešojo sektoriaus srityse.

Antimikrobinės savybės

OPTISAL® PLUS is:

- baktericidinis (inc. MRSA)
- tuberkulocidinis
- mielicidinis
- fungicidinis
- efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu įsk. HBV/HIV/HCV/Vaccinia-/BVDV/gripo virusus
- efektyvus prieš Noro, Adeno ir Rota virusus

Pakuotės

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 L butelis	12 x 1L	00-245-010EXP
5 L bakelis	3 x 5L	00-245-050EXP



Dozavimas ir ekspozicijos laikas

Antimikrobinės savybės		5 min.	15 min.	30 min.	60 min.
paviršiaus dezinfekcija pagal DGHM/VAH (baktericidinis, mielicidinis)	mechaninis veikimas, užterštos sąlygos	2.5 %	1.5 %	1 %	0.5 %
	paviršiaus dezinfekcija pagal EN 16615 (4sričių testas, baktericidinis, mielicidinis)**				0.5 %
efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu įsk. HBV/HIV/HCV	pagal RKI/DVV reglamentus	1 %			0.5 %
	BVDV	0.25 %			
	Vaccinia virusas	1 %			0.5 %
MNV (Murine Noro virus -pelių Noro virusas)	EN 14476, švariomis	2 %	1 %		0.5 %
	EN 14476, užterštos sąlygos	2 %	1 %		
Adeno virusas	EN 14476, švariomis		2 %		1 %
	EN 14476, užterštos sąlygos			2 %	1 %
Rota virusas	EN 14476, švariomis	0.5 %			
fungicidinis (Aspergillus brasiliensis)	DGHM, užterštos sąlygos				3 %

** patvirtintas efektyvumas su one system PLUS ir one system basic servetėlių dozavimo sistemomis

NAUJA

VAH/DGDM

ÖGHMP

CE 0482

DESCOCEPT forte

alkoholinis dezinfekantas greitai dezinfekcijai

- baktericidinis, įsk. MRSA, mielicidinis
- virusidinis, įsk. Polio-, Adeno-, Rota- ir Noro-virusus
- be kvapiųjų medžiagų



DESCOCEPT forte yra paruoštas naudoti dezinfekantas greitai paviršių dezinfekcijai alkoholio (etanolio) pagrindu. Produktas yra skirtas tikslinei antivirusinei alkoholiui atsparių paviršių dezinfekcijai. Dėka jo naujoviškos SLT booster technologijos, DESCOCEPT forte užtikrina veiksmingą dezinfekciją didelio organinio užteršimo atvejais (užterštomis sąlygomis).

virusidinis

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 L butelis	10	00-330-010
5 L bakelis	3	00-330-050
10 L bakelis	1	00-330-100

Antimikrobinės savybės	Naudojimo būdas
baktericidinis įsk. MRSA, mielicidinis pagal VAH/EN 13727/EN 13624	Paviršiaus dezinfekcija pagal EN 13697:
tuberkulocidinis pagal EN 14348	švariomis sąlygomis: konc. 1 min.
virusidinis įsk. HBV, HIV, HCV, Rota virusą, Noro virusą pagal EN 14476	pagal Vokietijos reglamentus/VAH
virusidinis pagal prEN 16777	užterštomis sąlygomis: konc. 1 min.
Veikliųjų medžiagų 100 g 60 g etanolio	

Saugiai naudokite dezinfekavimo priemones. Prieš pradėdami naudoti visada perskaitykite etiketę ir produkto informaciją.

VAH/DGDM

ÖGHMP

IHO

CE 0482

DESCOCEPT pur

alkoholinis dezinfekantas greitai dezinfekcijai

- nepaliekantis dėmių
- greitai veikiantis
- be kvapiųjų medžiagų, todėl ypač tinka alergiškiems asmenims



patvirtinta
HETTICH
Zentrifugen

bekvapis

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 L butelis	10	00-323-010
5 L bakelis	3	00-323-050

Paruoštas naudoti alkoholinis dezinfekantas etanolio pagrindu greitai ir efektyviai medicinos prietaisų, medicinos inventoriaus, o taip pat įvairių paviršių dezinfekcijai.

DESCOCEPT pur ypač tinka greitai dezinfekcijai maisto pramonėje ir valgyklų virtuvėse.

Antimikrobinės savybės	Naudojimo būdas
baktericidinis įsk. MRSA, mielicidinis pagal VAH/DGDM/EN 1276/EN 1650/EN 13697	Paviršiaus dezinfekcija pagal VAH/DGDM/Europos standartus/EN 13697:
tuberkulocidinis pagal EN 14348	švariomis sąlygomis: 1 min.
efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu įsk. Hepatito B virusą/ŽIV/Hepatito C virusą	užterštomis sąlygomis: 1 min.
efektyvus prieš Rota virusą ir Noro virusą (MNV) pagal EN 14476	
Veikliųjų medžiagų 100 g 45.0 g (53 % V/V) etanolio	

Saugiai naudokite dezinfekavimo priemones. Prieš pradėdami naudoti visada perskaitykite etiketę ir produkto informaciją.

DESCOCEPT AF

alkoholinis dezinfekantas greitai dezinfekcijai

VAH/DGHM

ÖGHMP

CE 0482

- malonaus kvapo dezinfekantas greitai dezinfekcijai, be aldehidų
- virusidinis veikimas, įsk. Noro virusą
- itin švelnus odai

taip pat
galimas su
CITRINOS
kvapu

DESCOCEPT AF yra etanolio ir ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintas paruoštas naudoti preparatas greitai ir efektyviai alkoholiui atsparių medicininių prietaisų, medicinos inventoriaus ir visų tipų paviršių dezinfekcijai. Be aldehidų. Ypač tinka naudoti sunkiai pasiekiamiems paviršiams ir visoms vietoms, kurias reikia greitai dezinfekuoti. DESCOCEPT AF sudėtyje nėra aldehidų ir fenolių, todėl jis yra malonaus ir gaivaus kvapo. Kadangi sudėtyje nėra aldehidų, naudojant DESCOCEPT AF apdorotų medžiagų spalvos neblunka.

DESCOCEPT AF yra visapusiškai efektyvus prieš virusus, įsk. Noro virusą. Naudojant specialią purškimo galvutę, DESCOCEPT AF gali būti naudojamas ir kaip dezinfekavimo putos.



naudojamas
kaip putos

Pakuotės

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
500 ml butelis	10 x 500 ml	00-311-005
1 L butelis	12 x 1 L	00-311-010EXP
5 L bakelis	3 x 5 L	00-311-050
10 L bakelis	1 x 10 L	00-311-100

Pakuotės citrinos kvapo

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 L butelis	12 x 1 L	00-311L-010EXP
5 L bakelis	3 x 5 L	00-311L-050EXP
10 L bakelis	1 x 10 L	00-311L-100EXP

Antimikrobinės savybės	Naudojimo būdas
baktericidinis įsk. MRSA, mielicidinis pagal VAH/DGHM/EN 1040/EN 1276/EN 1650/EN 13697 tuberkulocidinis fungicidinis efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu , įsk. Hepatito B virusą/ŽIV/Hepatito C virusą efektyvus prieš Adeno virusą/Rota virusą ir Noro virusą (MNV) pagal EN 14476	Paviršiaus dezinfekcija pagal Europos standartus/EN 13697: švariomis sąlygomis: 1 min. pagal Vokietijos reglamentus/VAH/DGHM užterštomis sąlygomis: 1 min.
Veikliųjų medžiagų 100 g	42,0 g (50 % V/V) etanolio, 0,05 g didecildimetilamONIO chlorido

Alkoholiniai preparatai greitai dezinfekcijai

CE 0482



DESCOSEPT RF

alkoholinis dezinfekantas greitai dezinfekcijai

- greitas džiūvimas, nepaliekant dėmių
- visiems alkoholiui atspariems paviršiams
- malonaus kvapo

DESCOSEPT RF paruoštas naudoti preparatas greitai ir efektyviai alkoholiui atsparių visų tipų paviršių ir neinvazinių medicininių prietaisų dezinfekcijai ir valymui, nepaliekantis dėmių. Idealiai tinka tais atvejais, kai reikalingas greitas kontakto ir džiūvimo laikas, nepaliekant dėmių.

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 L butelis	12	00-325-010EXP
5 L bakelis	3	00-325-050EXP

Antimikrobinės savybės	Naudojimo būdas
baktericidinis, mielicidinis, tuberkulocidinis pagal EN1040, EN1276, EN1650, EN13697, EN14348	Paviršiaus dezinfekcija pagal Europos standartus / EN 13697: švariomis sąlygomis: 30 sek.
virusidinis prieš MNV ir rota virusus pagal EN14476	
Veikliųjų medžiagų 100 g mirkymo tirpale 63 g 2-propanolio / 100 g (70% V/V)	

Saugiai naudokite dezinfekavimo priemones. Prieš pradėdami naudoti visada perskaitykite etiketę ir produkto informaciją.

Preparatų greitai dezinfekcijai naudojimo sritys

Pats pavadinimas pasako, kad paruošti naudoti preparatai greitai dezinfekcijai yra naudojami tais atvejais, kai paviršiai ar medicinos prietaisai turi būti naudojami kaip įmanoma greičiau po dezinfekcijos.

Tipiški tokios dezinfekcijos pavyzdžiai yra šalia pacientų esančių paviršių arba ligoninėse ir klinikose esančių paviršių, dažnai kontaktuojančių su rankomis ir oda, tokių kaip apžiūros stalai, chirurginės lempos, turėklai ar telefonai, valymas ir dezinfekcija. Medicinos prietaisų paviršiai, kaip pavyzdžiui ultragarso davikliai ar net prietaisų valdymo elementai, po dezinfekcijos turi būti greitai prieinami kitam pacientui. Alkoholiniai arba bealkoholiniai preparatai turi būti parenkami, atsižvelgiant į valomo paviršiaus medžiagas. Alkoholiui jautrioms medžiagoms, kaip pavyzdžiui akriliniams stiklui, turi būti naudojami tik bealkoholiniai preparatai.



DESCOSEPT **spezial**

bealkoholinis dezinfekantas greitai dezinfekcijai

- ypač tinka akriliniam stiklui
- puikios valymo savybės
- trumpas kontaktinis laikas

DESCOSEPT **spezial** yra bealkoholis ir paruoštas naudoti preparatas alkoholiui jautraus medicinos inventoriaus, medicinos prietaisų, įsk. Inkubatorių, ir visų rūšių paviršių greitai dezinfekcijai ir valymui.

VAH/DGHM

ÖGHMP

CE 0482



naudojamas
kaip putas

Antimikrobinės savybės	Naudojimo būdas
baktericidinis įsk. MRSA, mielicidinis pagal VAH/DGHM/EN1276/EN13727/EN1650/EN13624/EN13697	Paviršiaus dezinfekcija pagal Vokietijos reglamentus /VAH/DGHM: užterštomis sąlygomis: 1 min.
efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu įsk. Hepatito B virusą/ŽIV/Hepatito C virusą	
efektyvus prieš Rota virusą ir Papovą/Poliomos virusą pagal EN 14476	
Veikliųjų medžiagų 100 g	0.25 g didecildimetilamonio chlorido 0.5 g alkilbenzildimetilamonio chlorido

Be alkoholio

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 L butelis	12	00-208-010EXP
5 L bakelis	3	00-208-050EXP

Saugiai naudokite dezinfekavimo priemones. Prieš pradėdami naudoti visada perskaitykite etiketę ir produkto informaciją.

DESCOSEPT **spezial WIPES**

bealkoholinės servetėlės greitai dezinfekcijai

- bealkoholinės servetėlės didelių paviršių greitai dezinfekcijai
- greitai veikiančios
- aukštas medžiagų suderinamumas

Bealkoholinės, paruoštos naudoti dezinfekavimo servetėlės greitai medicinos inventoriaus ir visų rūšių paviršių dezinfekcijai ir valymui medicinos srityse, o taip pat maisto pramonėje ir valgyklų virtuvėse. Ketvirtinių amonio junginių pagrindu.

DESOTEX
WIPE SYSTEMS

VAH/DGHM

CE 0482



Antimikrobinės savybės	Naudojimo būdas
baktericidinis įsk. MRSA, mielicidinis pagal VAH/DGHM/EN1276/EN13727/EN1650/EN13624/EN13697	Paviršiaus dezinfekcija pagal Vokietijos reglamentus /VAH/DGHM: užterštomis sąlygomis: konc. 1 min.
efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu įsk. Hepatito B virusą/ŽIV/Hepatito C virusą	
efektyvus prieš Rota virusą ir Papovą/Poliomos virusą pagal EN 14476	
Veikliųjų medžiagų 100 g mirkymo tirpale	0.25 g didecildimetilamonio chlorido 0.5 g alkilbenzildimetilamonio chlorido

be alkoholio

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 dozatorius ir 100 servetėlių (30 x 32 cm)	1	00-208-ERS100
1 papildoma 100 servetėlių pakuotė (30 x 32 cm)	2	00-208-RS100-01

Saugiai naudokite dezinfekavimo priemones. Prieš pradėdami naudoti visada perskaitykite etiketę ir produkto informaciją.

Bealkoholinės servetėlės greitai dezinfekcijai



VAH/DGHH

ÖGHMP

CE 0482



CLEANISEPT® WIPES

bealkoholinės servetėlės greitai dezinfekcijai

- kontakto su gleivinėmis neturinčių ultragarso daviklių dezinfekavimui
- greitai veikia, taip pat ir Papova-virusus
- ypač švelnios dezinfekuojamiems paviršiams

CLEANISEPT® WIPES yra paruoštos naudoti servetėlės greitai medicinos prietaisų ir šalia pacientų esančių vietų dezinfekcijai ir valymui. CLEANISEPT® WIPES – ypač tinka medicinos prietaisams, kurie yra jautrūs alkoholiui, tokių kaip neturintys kontakto su gleivinėmis ultragarso davikliai. Jos taip pat gali būti naudojamos maisto pramonės įmonėse ir virtuvėse. Ketvirtinių amonio junginių pagrindu sukurtas mirkymo tirpalas yra bealkoholinis ir jame nėra nei aldehydų, nei fenolių. CLEANISEPT® WIPES servetėlės yra patogiai po vieną išimamos iš dozatoriaus ir iš karto yra paruoštos naudoti.

be alkoholio

Vienetas	Partijos Nr.
1 Dozatoriaus dėžutė ir 100 servetėlių (dydis 14 x 20 cm)	12 00-208-D100EXP
1 papildoma 100 servetėlių pakuotė (dydis 14 x 20 cm)	12 00-208-R100-01

patvirtintos ultragarso daviklių gamintojų

TOSHIBA |
 SIEMENS |
 PHILIPS |
 HITACHI
 SHIMADZU | SONOACE | ALOKA | @saote

Veikliųjų medžiagų 100 g mirkymo tirpale 0,25 g Didecildimetilamonio chlorido
0,5 g Alkilbenzildimetilamonio chlorido



VAH/DGHH

ÖGHMP

CE 0482



CLEANISEPT® WIPES MAXI

bealkoholinės servetėlės greitai dezinfekcijai

- medicinos prietaisų paviršių ir kitų kontaktinių paviršių dezinfekcijai
- greitai veikia, taip pat ir Papova-virusus
- ypač tinka dideliems paviršiams

CLEANISEPT® WIPES MAXI yra bealkoholinės dezinfekcijos servetėlės greitai medicinos įrangos ir visų rūšių paviršių dezinfekavimui visose maisto pramonės įmonėse ir pramoninėse virtuvėse, o taip pat medicinos srityje. Ypač tinka alkoholiui jautriems medicinos prietaisams. Ketvirtinių amonio junginių pagrindu. CLEANISEPT® WIPES MAXI yra bealkoholinės ir jų sudėtyje nėra nei aldehydų, nei fenolių. Iš patogios sandarios pakuotės po vieną išimamos CLEANISEPT® WIPES MAXI servetėlės yra iš karto paruoštos naudojimui.

patvirtintos ultragarso daviklių gamintojų

TOSHIBA |
 SIEMENS |
 PHILIPS |
 HITACHI
 SHIMADZU | SONOACE | ALOKA | @saote

MAXI

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 Sandari pakuotė su 80 servetėlių (dydis 20 x 22 cm)	12	00-208-T080EXP

Veikliųjų medžiagų 100 g mirkymo tirpale 0,25 g Didecildimetilamonio chlorido
0,5 g Alkilbenzildimetilamonio chlorido

Bealkoholinės servetėlės greitai dezinfekcijai

CLEANISEPT® WIPES forte

bealkoholinės servetėlės greitai ultragarso daviklių dezinfekcijai



VAH/DGHM

RKI/DVV

CE 0482

- baktericidinės, įsk. MRSA, mielicidinės pagal DGHM/VAH
- virusidinės, įsk. Polio-, Adeno-, Papova/ Poliomos-, Vaccinia virusus ir HBV/ŽIV/HCV/gripo virusus
- transvaginalinių ultragarso daviklių virusidinis dezinfekavimas



Produkto savybės

Bealkoholinės paruoštos naudoti servetėlės transvaginalinių ultragarso daviklių virusidinei dezinfekcijai ir valymui. Po vieną iš patogaus dozatoriaus išimamos CLEANISEPT® WIPES forte servetėlės yra paruoštos naudoti iš karto. Dezinfekavimo skysčio sudėtyje nėra alkoholio, aldehydų ir fenolių.

Paskirtis

Pagal MDD (Medicinos prietaisų direktyvą): alkoholiui jautrių medicinos prietaisų, tokių kaip ultragarso davikliai transvaginaliniams tyrimams, dezinfekavimas ir valymas.

Taikymas

Paruošta naudoti servetėlė valykite paviršius kol jie bus pilnai sudrėkinti. Praėjus kontaktiniam laikui, kruopščiai nuskalaukite ultragarso daviklius vandeniu.

Antimikrobinės savybės

CLEANISEPT® WIPES forte:

- baktericidinės įsk. MRSA
- mielicidinės
- virusidinės (įsk. Polio-, Adeno-, Papova/Poliomos-, Vaccinia virusus, o taip pat HBV/ŽIV/HCV/ gripo virusu)
- sporicidinės

virusidinis + sporicidininis per
120 sek.

Pakuotės

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
Dozatoriaus dėžutė 100 servetėlių	12	00-235-D100

patvirtinta ultragarso daviklių gamintojų

@saote | SIEMENS

Ekspozicijos laikas

Antimikrobinės savybės		30 sek.	2 min.
Baktericidinės įsk. MRSA, mielicidinės pagal DGHM/VAH (paviršiaus dezinfekcija mechaninis veikimas, užterštos sąlygos)			•
virusidinis	pagal RKI/DVV		•
	Polio virusas	•	
	Adeno virusas	•	
	Poliomos virusas/SV 40		•
	Vaccinia virusas	•	
sporicidinės	Clostridium difficile, pagal EN 13704		•

Alkoholinės servetėlės greitai dezinfekcijai

VAH/DGHH

ÖGHMP

IHO

CE 0482



DESCOSEPT PUR WIPES RTU

NAUJA

alkoholinės servetėlės greitai dezinfekcijai

- idealiai tinka higieniškai kritiškomis arba šalia paciento esančioms vietoms
- greitas ir lengvas naudojimas
- efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu, įsk. Rota- ir Noro-virusus

DESCOSEPT PUR WIPES RTU yra alkoholinės paruoštos naudoti servetėlės greitai neinvazinių medicinos prietaisų ir paviršių dezinfekcijai higieniškai kritiškose arba šalia paciento esančiose vietose. DESCOSEPT PUR WIPES RTU yra paruoštos naudoti ir po naudojimo nereikalingas skalavimas.

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 pakartotino pripildymo pakuotė su 120 servetėlių	2 x 1	00-323-RS120

Antimikrobinės savybės	Naudojimo būdas
baktericidinis įsk. MRSA, mielicidinis pagal VAH/EN 1276/EN 1650/EN 13697 mikobaktericidinis pagal EN 14348 efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu įsk. Hepatito B virusą/ŽIV/Hepatito C virusą efektyvus prieš Rota virusą ir Noro virus (MNV) pagal EN 14476	Paviršiaus dezinfekcija pagal VAH/EN 13697: 1 min. Veikliųjų medžiagų 100 g mirkymo tirpale 45.0 g (53 % V/V) Etanolio

Saugiai naudokite dezinfekavimo priemones. Prieš pradėdami naudoti visada perskaitykite etiketę ir produkto informaciją.

VAH/DGHH

ÖGHMP

CE 0482



DESCOSEPT SENSITIVE WIPES

NAUJA

alkoholinės servetėlės greitai dezinfekcijai

- nepalieka ruoželių
- ypač švelnios jautrioms paviršių medžiagoms
- greita veikia, efektyvios prieš Noro-virusus

DESCOSEPT SENSITIVE WIPES yra paruoštos naudoti servetėlės greitai jautrių paviršių dezinfekcijai ir valymui. DESCOSEPT SENSITIVE WIPES – ypač tinka ekranams, klaviatūroms ir kitų medicinos prietaisų jautriems paviršiams valyti ir yra naudojamos medicinos srityse. Valymo medžiaga ir mirkymo tirpalas buvo sukurtas siekiant idealiai suderinti ir pateikti švelnų ir efektyvų dezinfekavimą. DESCOSEPT SENSITIVE WIPES yra praktiškoje sandarioje pakuotėje, gali būti išimamos po vieną ir yra paruoštos naudoti iš karto.

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 1 sandari pakuotė su 80 servetėlių (dydis 20 x 22 cm)	12 x 1	00-323DS-T080

Antimikrobinės savybės	Naudojimo būdas
baktericidinis įsk. MRSA, mielicidinis pagal VAH/EN 1276/EN 1650/EN 13697 mikobaktericidinis pagal EN 14348 efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu įsk. Hepatito B virusą/HIV/Hepatito C virusą efektyvus prieš Rota virusą ir Noro virus (MNV) pagal EN 14476	Paviršiaus dezinfekcija pagal VAH/EN 13697: 1 min. Veikliųjų medžiagų 100 g mirkymo tirpale 45.0 g (53 % V/V) Etanolio

Saugiai naudokite dezinfekavimo priemones. Prieš pradėdami naudoti visada perskaitykite etiketę ir produkto informaciją.

DESCOCEPT AF WIPES

alkoholinės servetėlės greitai dezinfekcijai

- be aldehydų
- malonaus kvapo
- veikia Noro virusus

Produkto savybės

DESCOCEPT AF WIPES yra etanolio ir ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintos ir paruoštos naudoti dezinfekavimo servetėlės be aldehydų. DESCOCEPT AF WIPES maloniai kvepia. Kadangi DESCOCEPT AF WIPES sudėtyje nėra aldehydų, apdorojamų paviršių spalvos nenublunka. Dezinfekavimo tirpalas yra ypač efektyvus prieš virusus, įsk. Noro virusą. DESCOCEPT AF WIPES idealiai tinka greitai alkoholiui atsparių paviršių ir inventoriaus dezinfekcijai.

DESCOCEPT AF WIPES servetėlės po vieną išimamos iš patogaus dozatoriaus ir iš karto yra paruoštos naudoti.

Taikymas

Nuvalykite paviršius ir objektus su DESCOCEPT AF WIPES. Numatytą kontaktinį laiką paviršiai turi išlikti drėgni.

Ekspozicijos laikas

Atsižvelgiant į Descosept AF mirkymo tirpalą:

Antimikrobinės savybės		30 sek.	1 min.	2 min.	5 min.	30 min.
paviršiaus dezinfekcija pagal DGHM/VAH (baktericidinis, mielicidinis) (*išvardyta VAH sąrašo 5 min stulpelyje)	mechaninis veikimas, užterštos sąlygos		•			
	be mechaninio veikimo, švariomis sąlygomis		•*			
	be mechaninio veikimo, užterštos sąlygos			•*		
paviršiaus dezinfekcija pagal DGHM/VAH (tuberkulocidinis)	be mechaninio veikimo, švariomis sąlygomis			•		
efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu įsk. HBV/HIV/HCV	pagal RKI/DVV	•				
	BVDV	•				
	Vaccinia-Virusas	•				
Adeno virusas	pagal RKI/DVV		•			
Rota virusas	pagal RKI/DVV		•			
Noro virusas (MNV)	pagal EN 14476				•	
tuberkulocidinis (M. terrae)	pagal EN14348		•			
fungicidinis (Aspergillus brasiliensis)	švariomis sąlygomis					•

Yra ir CITRINŲ kvapo



DESOTEX
WIPE SYSTEMS

VAH/DGHM

CE 0482

Paskirtis

Pagal MDD (Medicinos prietaisų direktyvą): neinvazinių alkoholiui atsparių medicinos prietaisų greita dezinfekcija.

Pagal biocidinių produktų reglamentą: alkoholiui atsparaus medicinos inventoriaus ir visų rūšių paviršių greita dezinfekcija ir valymas.

Antimikrobinės savybės

DESCOCEPT AF WIPES dezinfekavimo tirpalas:

- baktericidinis (įsk. MRSA)
- tuberkulocidinis
- mielicidinis, fungicidinis
- virusidinis, įsk. HBV/HIV/HCV/BVDV/Rota-/Rota-/Adeno-/Vaccinia-/Noro virusus

Pakuotės

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
Dozatoriaus dėžutė su 120 servetėlių (dydis 14 x 20 cm)	12 x 1 dėžutė	00-312-D120-01
Pakartotino pripildymo pakuotė su 100 servetėlių (dydis 14 x 20 cm)	12 x 1 pakuotė	00-312-R120-01

Pakuotės citrinos kvapo

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
Dozatoriaus dėžutė su 120 servetėlių (dydis 14 x 20 cm)	12 x 1 dėžutė	00-312L-D120EXD

Dezinfekcinės valymo sistemos

one system⁺ PLUS

Novatoriška 50% ilgesnio veiksmingumo vienkartinį neaustinių servetėlių dozavimo sistema paviršių dezinfekcijai*

- pripildyta paruoštomis dezinfekanto prisotinimui DESOTEX® neaustinėmis servetėlėmis
- paruošiamos naudojimui per 15 minučių* – taip pat ypatingos infekcijos rizikos vietoms – išlieka veiksmingos 6 savaites*
- novatoriškas dizainas ypač paprastam naudojimui ir užpildymo lygio kontrolei

Produkto specifikacija

one system PLUS yra vienkartinį neaustinių servetėlių dozavimo sistema, naudojama paviršių, įskaitant medicinos prietaisų paviršius, dezinfekavimui ir valymui visose medicinos aplinkose. one system PLUS yra paprasta, saugi ir efektyvi. Novatoriška sistema greitai paruošiama naudojimui, nereikalauja perdirbimo ir yra ypač patogi. one system PLUS – idealiai tinka visoms vietoms, nuo galimų infekcijų rizikos iki ypatingos infekcijos rizikos vietų.

one system PLUS dozatorius yra tiekiamas užpildytas aukščiausios kokybės DESOTEX® neaustinėmis servetėlėmis ir gali būti užpildomas vartotojo pasirinktu dezinfekantu. one system PLUS paruošiama naudoti per 15 minučių* po prisotinimo ir gali būti iš karto naudojama paviršių dezinfekcijai. Neaustinės servetėlės yra pagamintos iš nepaliekančio pūkelių pluošto. Jos užtikrina puikų dezinfekavimo tirpalo pasiskirstymą ir garantuoja puikų dezinfekuojamų paviršių padengimą.

Paskirtis

one system PLUS gali būti naudojama visų tipų paviršių, medicinos įrangos ir medicinos prietaisų paviršių dezinfekavimui ir valymui visose medicinos įstaigose, pavyzdžiui ligoninėse, globos namuose ir medicinos bei odontologijos klinikose, farmacijos pramonėje ar laboratorijose.

Sudėtis

one system PLUS dozatoriuje yra 100 vnt. 32 cm x 30 cm dydžio servetėlių, pagamintų iš plyšimui atsparios, pluošto nepaliekančios neaustinės medžiagos (100 % PET sintetinio pluošto).

Pakuotės

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 one system PLUS dozatorius	2	00-915-OSEE100

*Lyginant su kitais įprastiniais paviršių dezinfekantais, veiksmingais 28 dienas, ir įsotinamais per 30 minučių, testuotų VAH išvardytų Dr. Schumacher kompanijos paviršių dezinfekantų OPTISAL® PLUS, BIGUANID FLÄCHE N, DESCOSEPT AF, DESCOSEPT forte ir CLEANISEPT® įsotinimo laikas tik 15 minučių ir pripildytos sistemos veiksmingumo laikas 42 dienos.

NAUJA

NESUDĖTINGA

- + Vienkartinį neaustinių servetėlių dozavimo sistema, pripildyta sausomis servetėlėmis
- + Nereikia užpildyti servetėlėmis ar apdoroti dozatoriaus
- + Greičiau veikia dėl QuickStart technologijos, prisotinimo laikas 15 minučių*
- + Pakartotinai uždaroma anga papildymui ir lengvam servetėlių išėmimui

LANKSTU

- + Tvirta ir lengva konstrukcija, pritaikyta tiek naudojimui palatose, tiek ir mobiliam naudojimui
- + Papildomai pasirenkama rankena su greita jungtimi
- + Grynas polipropilenas, atsparus visoms įprastoms valymo ir dezinfekcijos priemonėms

EKONOMIŠKA

- + QuickStart funkcija su prisotinimu per 15 minučių greitesniam pasiruošimui naudojimui*
- + 50% ilgesnis veiksmingumo laikas* retesniai atliekų tvarkymui dėl ilgiausio veiksmingumo laiko
- + Vienkartinį servetėlių sistema taupo laiką, nes išvengiama apdorojimo
- + Taupo sandėliavimo vietą, nes sausos servetėlės yra jau įdėtos į dozavimo sistemą
- + Surenkamas, lengvas dozatorius paprastam atliekų pašalinimui
- + Paprasta užpildymo lygio kontrolė, leidžianti greitai ir patogiai papildyti sistemą

*Kai naudojama su:

OPTISAL® PLUS | BIGUANID FLÄCHE N
DESCOSEPT AF | DESCOSEPT forte | CLEANISEPT®

Efektivumas patikrintas, naudojant 4-komponentų testą su visais privalomais testo elementais pagal EN 16615 (baktericidinis/mielicidinis)



pripildyta
100
32 cm x 30 cm dydžio servetėlių

VEIKIMO LAIKAS
6 SAVAITĖS

PATIKRINTA*



SAUGU

- + Novatoriškas skaidrus dozatoriaus dizainas leidžia greitai kontroliuoti užpildymo lygį, net ir esant blogam apšvietimui
- + Tinkamos naudojimui tiek galimos, tiek ir ypatingos infekcijos rizikos vietose
- + Vienkartinio naudojimo koncepcija padeda išvengti perdirbimo klaidų ir užteršimo
- + Ypač lengvas ir saugus naudojimas kasdieninėje ligoninės veikloje



PATIKIMA

- + Dozatorius pripildytas patikrintomis DESOTEX[®] sausomis neaustinėmis servetėlėmis
- + Daug mažiau darbo, lyginant su kitomis daugkartinio naudojimo ir vienkartinėmis sistemomis
- + Ilgesnis naudojimosi laikas dėl sutrumpinto prisotinimo laiko*
- + 100 didelių servetėlių (32 cm x 30 cm) didesnių plotų apdorojimui

QUICKSTART

15 MIN.

FUNKCIJA*



DESCO WIPES

dezinfekcinių servetėlių dozavimo sistema

- prisotinimui paviršiaus dezinfekantais
- pakartotinai pripildoma dozavimo sistema
- puikus dezinfekavimo tirpalo perdavimas

Desco Wipes DT yra sausos neaustinės medžiagos servetėlės, skirtos prisotinimui dezinfekantais ir naudojimui paviršių ir medicinos prietaisų greitai ir lengvai dezinfekcijai bei valymui. Desco Wipes DT – aukščiausios kokybės servetėlės, pagamintos iš pūkelių nepaliekančios neaustinės medžiagos.

Desco Wipes DT yra suderinamos su visais rinkoje esančiais paviršių dezinfekantais. Puikus dezinfekavimo tirpalo perdavimas garantuoja tinkamą ir tolygų dezinfekuojamo paviršiaus sudrėkinimą. Desco Wipes DT lengvai išimamos iš specialiai pritaikyto ir sandariai uždaro dozavimo kibirėlio.



DESCO WIPES DT dozavimo kibirėlis

- pakartotinai pripildomas dozavimo kibirėlis
- 32 x 30 cm dydžio servetėlėms
- tuščias

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 dozavimo kibirėlis, tuščias	1	00-915-E001
6 dozavimo kibirėliai, tušti	6	00-915-E002
1 sieninis laikiklis	1	00-902-EIM



DESCO WIPES DT

- servetėlės prisotinimui paviršiaus dezinfekantais
- puikus dezinfekavimo tirpalo perdavimas
- 32 x 30 cm dydžio

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 100 servetėlių/pakelis	3	00-915-RD10003-01
1 100 servetėlių/pakelis	6	00-915-RD10006-01
1 50 servetėlių/pakelis	3	00-915-RD5003-01



DESCO WIPES DT mažas dozavimo kibirėlis

- pakartotinai pripildomas dozavimo kibirėlis
- 25 x 25 cm dydžio servetėlėms
- tuščias

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 dozavimo kibirėlis, tuščias	1	00-915-EK004
6 dozavimo kibirėliai, tušti	6	00-915-EK005
1 sieninis laikiklis mažas	1	00-902-EIMK



DESCO WIPES DT SMALL

- servetėlės prisotinimui paviršiaus dezinfekantais
- puikus dezinfekavimo tirpalo perdavimas
- 25 x 25 cm dydžio

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 70 servetėlių/pakelis	3	00-915-RD7003-01

ECO WIPES

dezinfekcinių servetėlių dozavimo sistema

- tinka naudoti su paviršiaus dezinfekantais
- pakartotinai pripildoma dozavimo sistema
- puikus veikliųjų medžiagų perdavimas

ECO WIPES yra sausos servetėlės, skirtos prisotinti dezinfekantais ir naudoti greitai ir lengvai paviršių ir medicinos prietaisų dezinfekcijai bei valymui. ECO WIPES buvo specialiai paviršių dezinfekcijai sukurtos servetėlės ir gali būti derinamos su visais rinkoje esančiais dezinfekantais.

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 dozavimo kibirėlis, tuščias	1	00-915-EEW001
6 dozavimo kibirėliai, tušti	6	00-915-EEW002
1 sieninis laikiklis	1	00-902-EIM

ECO WIPES dozavimo kibirėlis

- pakartotinai pripildomas dozavimo kibirėlis
- 32 x 30 cm dydžio servetėlėms
- tuščias



Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 100 servetėlių/pakelis	3	00-915-REW10003-01
1 100 servetėlių/pakelis	6	00-915-REW10006-01
1 50 servetėlių/pakelis	3	00-915-REW5003-01

ECO WIPES

- tinka naudoti su paviršiaus dezinfekantais
- puikus dezinfekavimo tirpalo perdavimas
- 32 x 30 cm dydžio



Paprastas DESOTEX WIPE sistemų apdorojimas

Daugkartinio naudojimo DESOTEX dezinfekcinių valymo sistemų pakartotinio užpildymo servetėlės tiekiamos su dviejų pakelių komplektu, skirtu kibirėlio apdorojimui prieš naudojimą. Pakelyje Nr. 1 yra paruošta naudoti servetėlė kibirėlio išvalymui. Pakelis Nr. 2 yra skirtas dezinfekuoti kibirėlį prieš pakartotinį jo pripildymą. Šis procesas yra mokslškai patvirtintas.



one system basic

kompaktiška vienkartinė neaustinių paviršių dezinfekcijos servetėlių dozavimo sistema



- pripildyta DESOTEX® neaustinėmis servetėlėmis, paruoštomis prisotinimui dezinfekantu
- paruošiama naudoti per 15 minučių – taip pat ir ypatingos infekcijos rizikos vietose, 50% ilgesnis 6 savaičių veiksmingumo laikas
- kompaktiškas pastatomas maišelis lengvam naudojimui ir sunaikinimui

one system basic yra vienkartinė neaustinių servetėlių dozavimo sistema, skirta naudoti paviršių valymui ir dezinfekavimui visose medicinos srityse, įskaitant medicinos prietaisų paviršius. Idealiai tinka tiek galimos infekcijos, tiek ir ypatingos infekcijos rizikos vietose.

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
1 120 one system basic (dydis 17,5 x 36 cm)	4	00-915-OSEB120
1 sieninis laikiklis	1	00-902-OSB

one system basic

- ypač patogus ir kompaktiškas pastatomas maišelis
- novatoriškas, paprastas, saugus ir efektyvus
- pripildyta DESOTEX® neaustinėmis servetėlėmis

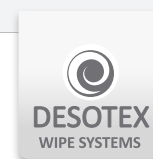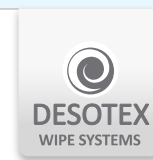

Dezinfekcija

68-69

Dezinfekcija ir valymas

Odontologija

*Odontologijos instrumentų dezinfekcija
ir valymas*

Odontologija

Dezinfekcija

Odontologijoje gali būti naudojami prieš tai aprašyti produktai instrumentų, paviršių ir greitai dezinfekcijai.

Tačiau dantų atspaudų, gręžimo ir siurbimo sistemų valymui ir dezinfekcijai reikalingi specialūs produktai su ypatingai aukštu medžiagų suderinamumu.

Šiam tikslui mes siūlome specialius produktus, kurie garantuoja patikimą pacientų, personalo ir medžiagų apsaugą.

	Taikymo sritis					Taikymo tipas		Produkto savybės		Produkto tipas	
	dantų grąžtai/instrumentai	atspaudų/protezavimo medžiagos	siurbimo sistemos	dezinfekcija	valymas	mirkymas	ultragarso vonelė	aldehidai	ketvirtiniai amonio junginiai	koncentratas	paruoštas naudoti
DESCOSUC			✓	✓	✓				✓	✓	
DESCOSUC CLEANER			✓		✓					✓	
ORANGE SOLVENT					✓						✓
DESCODRILL	✓			✓	✓	✓	✓		✓		✓
DESCOPRENT		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

Odontologijos instrumentų dezinfekcija ir valymas

VAH/DGHM

CE 0482



DESCOSUC

odontologinių siurbimo sistemų dezinfekantas

- puikios valymo savybės
- mažai putojantis
- optimali siurbimo sistemų apsauga

DESCOSUC yra ir dezinfekantas ir ploviklis, pasižymintis aukštu suderinamumu su visoms odontologijos siurbimo sistemomis, kurio sudėtyje nėra aldehidų ir fenolių. Jame nėra aktyvaus chloro, todėl jis tinka naudoti odontologijos siurbimo sistemomis su integruotais amalgamo atskyrikiais, nes neremobilizuoja sunkiųjų metalų, pavyzdžiui gyvsidabrio, iš amalgamo. DESCOSUC yra ypač mažai putojantis.

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
5 L bakelis	3	00-814-050EXD

Antimikrobinės savybės

baktericidinis įsk. MRSA, **mielicidinis** pagal VAH/DGHM/EN13624/EN13727/EN14561/EN14562 **tuberkulocidinis**
efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu įsk. Hepatito B virusą/ŽIV/Hepatito C virusą

Naudojimo būdas

Instrumentų dezinfekcija
pagal Vokietijos reglamentus/VAH/DGHM/EN, užterštomis sąlygomis: 1 % 30 min.
2 % 15 min.

CE



DESCOSUC CLEANER

odontologinių siurbimo sistemų ploviklis

- puikios valymo savybės
- mažai putojantis
- intensyvus ploviklis, naudojamas su Descosuc

DESCOSUC CLEANER yra skystas intensyvus ploviklis, skirtas odontologijos siurbimo sistemoms, naudojamas vieną arba du kartus per savaitę kartu su dezinfekantu. Jis užtikrina optimalų valymą ir sklandų odontologijos siurbimo sistemų darbą be trikdžių.

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
5 L bakelis	3	00-818-050EXD

Dozavimas/Ekspozicijos kartai

normalus organinis užteršimas 5 % 1.5 - 2 h
aukštas organinis užteršimas 10 % 1.5 - 2 h

CE



ORANGE SOLVENT

specialus odontologinių siurbimo sistemų ploviklis

- pagamintas iš natūralių apelsinų aliejaus
- puikios valymo savybės
- lengvai pašalina odontologijos medžiagų likučius

ORANGE SOLVENT yra paruoštas naudoti valymo tirpalas, kruopščiai pašalinantis alginato ir cemento likučius bei cinko-eugenolio dėmes nuo odontologijos instrumentų ir inventoriaus. Jis tinka ir lipnių liekanų, žymeklių likučių ir dryželių nuo paklotėlių valymui.

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
250 ml PET butelis	9	00-805-0025EXD
500 ml PET butelis	6	00-805-005EXD

DESCO DRILL

paruoštas naudoti besisukančių instrumentų dezinfekantas

- veikia antikoroziškai
- tinka ultragarso vonelėms
- aukštas medžiagų suderinamumas

Paruoštas naudoti preparatas be aldehydų ir fenolio dantų grąžtų ir kitų besisukančių precizinių prietaisų rankinei dezinfekcijai ir valymui mirkant. DESCO DRILL tinkamas net itin jautriems instrumentams, tokiems kaip aliumininiai grąžtai, guminiai poliruokliai ir arkanzaso akmenys, valyti ir dezinfekuoti.

VAH/DGHM

CE 0482



Antimikrobinės savybės

baktericidinis įsk. MRSA, mielicidinis pagal VAH/DGHM
tuberkulocidinis
efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu įsk. Hepatito B virusą/ŽIV/Hepatito C virusą
efektyvus prieš Polio virusą (at 50 °C)/Adeno virusą/Papova/Poliomos virusą

Naudojimo būdas

Instrumentų dezinfekcija
pagal Vokietijos reglamentus/VAH/DGHM
užterštomis sąlygomis: konc. 5 min.

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
5 L bakelis	3	00-815-050EXD
2 L butelis	6	00-815-020EXD

DESCOPRENT

dantų atspaudų ir protezavimo medžiagų dezinfekantas

- neįtakoja matmenų tikslumo
- negadina paviršiaus
- geros drėkinančios savybės, lengvai nuskalaujamas

Paruoštas naudoti odontologijos ruošinių ir dantų protezavimo medžiagų, tokių kaip polieteriai, A / C silikonai, alginatai ir hidrodamaininiai koloidai, dezinfekavimo ploviklis be formaldehido ir fenolio. DESCOPRENT puikiai valo ir tirpdo nešvarumus, pavyzdžiui, kraujo ir seilių likučius.

VAH/DGHM

CE 0482



Antimikrobinės savybės

baktericidinis įsk. MRSA, mielicidinis pagal VAH/DGHM
efektyvus prieš visus virusus su apvalkalu įsk. Hepatito B virusą/ŽIV/Hepatito C virusą
efektyvus prieš Rota virusą

Naudojimo būdas

Instrumentų dezinfekcija
pagal Vokietijos reglamentus/VAH/DGHM
užterštomis sąlygomis: konc. 5 min.

Vienetas	Kiekis	Partijos Nr.
5 L bakelis	3	00-813-050EXD

Dozatorius, dozavimas, laikiklis

71-75

Pagalbinės naudojimo priemonės

Pagalbinės naudojimo priemonės

Sieniniai dozatoriai ir dozavimo priemonės

SIENINIAI DOZATORIAI



AK 500 /1000 PLUS

- autoklavuojamas Euro dozatorius su aliuminio korpusu
- nerūdijančio plieno pompa gali būti lengvai nuimama neišardžius
- trumpa arba ilga nerūdijančio plieno svirtis
- 500 ml arba 1000 ml buteliams
- tiekiamas su fiksavimo dangteliu
- dozavimas 1.5 ml/paspaudimas, gali būti sumažintas trimis etapais



SPE 500 /1000

- plastikinis alkūninis sieninis dozatorius SPE 500 ir SPE 1000
- 500 ml ir 1000 ml buteliams
- uždaras dizainas su langeliu
- komplekte yra lašų surinkėjas
- stabili ir ilga plastikinė svirtis
- dozavimas 1,8 ml vienu paspaudimu, gali būti sumažintas trimis etapais



SPE TOUCHLESS 500 /1000

- bekontaktinis dezinfekantų dozatorius
- 500 ml ir 1000 ml buteliams
- uždaras dizainas su langeliu
- komplekte yra lašų surinkėjas
- dozavimas 1.8 ml vienu paspaudimu, gali būti sumažintas trimis etapais



DESIPOINT *surinktas mobilus stovas*

- higieniška nerūdijančio plieno konstrukcija
- greitas ir lengvas montavimas
- dera su visais rinkoje esančiais dozatoriais



DESIPOINT PRO *surinktas mobilus stovas*

- integruotas TFT ekranas
- greitai ir lengvai montuojamas
- dera su visais rinkoje esančiais dozatoriais

DOZAVIMO PRIEMONĖS



Dozavimo priemonės

- 1 1000 ml dozavimo butelis su 60 ml matavimo indu
- 2 bakelio atidarytuvas
- 3 dozavimo pompa 30 ml/paspaudimas, tinka 2 l buteliui, 5 l arba 10 l bakeliui. Mažesniame dozavimui tiekiamas tarpiklis (20 ml, 10 ml)
- 4 dozavimo pompa 3 ml/paspaudimas, tinka 500/1000 ml buteliui
- 5 čiaupas 2 l buteliui ir 5, 10 ir 30 l bakeliui
- 6 purškimo galvutė su adapteriu, tinkanti 500 ml / 1000 ml buteliams
- 7 putų purškimo galvutė su adapteriu, tinkanti 500 ml / 1000 ml buteliams
- 8 3 l matavimo ąsotis
- 9 40 ml matavimo indas

Dezinfekavimo vonelės

talpa	vonelės dydis (l x P x A)	įdėklo dydis (l x P x A)
1 L	223 x 149 x 91 mm	145 x 112 x 70 mm
3 L	315 x 206 x 125 mm	205 x 160 x 100 mm
4 L	343 x 213 x 115 mm	280 x 192 x 112 mm
5 L	394 x 260 x 156 mm	255 x 200 x 125 mm
10 L (endoskopams)	870 x 235 x 160 mm	695 x 170 x 128 mm

Odontologinių gražtelių vonelė

- skirta tikslių odontologijos instrumentų sukimui
talpa 100 ml dydis Ø 91 mm x 73

LAIKIKLIS

DESCOFLEX dėžutės laikiklis DH

- gali būti tvirtinamas prie sienos ir pan.
- tinka bendrai dezinfekcijai
- servetėlių talpos
- pagamintas iš chromuoto plieno



DESCOFLEX sieninis butelio laikiklis WH

- butelio laikiklis, tvirtinamas prie sienos
- tinka 500 ml / 1000 ml buteliams
- pagamintas iš chromuoto plieno



DESCOFLEX mobilus butelio laikiklis MH

- dedamas ant lovos rėmų ir pan.
- tinka 500 ml / 1000 ml buteliams
- pagamintas iš chromuoto plieno



Sieniniai laikikliai dezinfekavimo servetėlių sistemoms

- taupantis vietą sieninis montavimas
- skirtingų dydžių
- fiksuojama plokštelė uždengimui



DESCO WIPES DT
SMALL



DESCO WIPES DT &
ECO WIPES



one system
basic



one system PLUS

Spalvoti dozavimo kibirėlių dangteliai



Skirtingiems skyriams arba produktams galime pasiūlyti naudoti skirtingų spalvų dozatorius. Galima rinktis šiuos variantus:

■ mėlynas kibirėlio dangtelis:

mėlynas ištraukimo angos dangtelis
baltas ištraukimo angos dangtelis

■ baltas kibirėlio dangtelis:

mėlynas ištraukimo angos dangtelis
baltas ištraukimo angos dangtelis
žalias ištraukimo angos dangtelis
raudonas ištraukimo angos dangtelis
geltonas ištraukimo angos dangtelis

DESCOMAT KOMPAKT DIGITAL

automatizuotos dozavimo mašina

Kompiuteriu valdoma dezinfekantų ir valiklių dozavimo mašina

Descomat Kompakt digital yra novatoriškas Descomat Kompakt, įsitvirtinusio rinkoje per pastaruosius metus, variantas. Mašina valdoma kompiuteriu, todėl ją lengva naudoti. Jos išskirtinis techninis funkcionalumas sukuria naujus elektroninių dozavimo mašinų standartus.



Ypač patogus

- sistemos duomenys yra rodomi keturių eilučių ekrane
- lengva stebėti ir valdyti
- dozavimo normos: 0,25 - 5 % (gali būti iki 8 %), kintančios 0,25 % pakopomis
- išankstinis skiedinio kiekio pasirinkimas, keičiamas 0,4 l pakopomis
- vienam produktui galima pasirinkti dvi skirtingas koncentracijas ir tirpalo kiekius (pvz. vienas kasdiennei dezinfekcijai pagal VAH, kitas epidemijos atveju pagal RKI)
- uždara sistemos konstrukcija, apsauganti nuo bakterinio užteršimo
- atitinka BAM (Vokietijos medžiagų testavimo instituto) ir RKI (Robert Koch instituto) normas

Išskirtinis techninis funkcionalumas

- aiški technologija, paprastai atliekama priežiūra ir remontas
- USB jungtis lengvam visų naudojamo/klaidų duomenų įkėlimui per PDA arba nešiojamą kompiuterį (pasirenkama funkcija)
- visos jutiklių ir paleidiklių funkcijos rodomos LED ekrane (naudinga techniniam personalui)
- elektronikos danga pagaminta iš akrilinio stiklo
- fiksuojamos dūrelės, atidaromos be įrankių
- pagaminta iš nerūdijančio plieno ir kitų korozijai atsparių medžiagų

Tipai ir matmenys

- galimas kaip dvigubas prietaisas, pritaikytas dviems bakeliams ir leidžiantis dozuoti du produktus vienu metu
- galimas žalias ekrano apšvietimas (švelnus apšvietimas) patalpoms su dienos šviesa, ir mėlynas ekrano apšvietimas, pvz. patalpoms be langų
- lengvo svorio (8 kg), todėl galima montuoti ir ant mažiau patvarių sienų
- matmenys (HWD): 30 x 20 x 17 cm

Pagalbinių naudojimo priemonių apžvalga

Pagalbinių naudojimo priemonių apžvalga

Sieniniai dozatoriai	Dydis	Partijos Nr.	Vienetai
AK 500/1000 plus (ilga svirtis)	500 ml	00-901-005-01	1x1
	1000 ml	00-901-010-01	1x1
AK 500/1000 plus (trumpa svirtis)	500 ml	00-903-005-01	1x1
	1000 ml	00-903-010-01	1x1
SPE 500/1000	500 ml	00-918-005	1x1
	1000 ml	00-918-010	1x1
SPE Touchless 500/1000	500 ml	00-911-005TL	1x1
	1000 ml	00-911-010TL	1x1
Sieninio dozatoriaus priedai	Dydis	Partijos Nr.	Vienetai
Lašų surinkėjas AK 500 Plus	500 ml	00-901-205	1x1
Lašų surinkėjas AK 1000 Plus	1000 ml	00-901-210	1x1
DESIPOINT	Dydis	Partijos Nr.	Vienetai
DESIPOINT	160 cm	00-902-DS	1x1
DESIPOINT PRO	150 cm	00-902-DSD	1x1
Dėžutės ir sieniniai laikikliai	Dydis	Partijos Nr.	Vienetai
Descoflex dėžutės laikiklis DH	--	00-902-DH	1x1
Descoflex sieninis butelio laikiklis WH	500 ml / 1000	00-902-WH	1x1
Descoflex mobilus butelio laikiklis MH	500 ml / 1000	00-902-MH	1x1
DESCO WIPES DT + ECO WIPES sieninis laikiklis	--	00-902-EIM	1x1
DESCO WIPES DT SMALL sieninis laikiklis	--	00-902-EIMK	1x1
one system basic sieninis laikiklis	--	00-902-OSB	1x1
one system PLUS sieninis laikiklis	--	00-902-OSP	1x1
Dozavimo priemonės	Dydis	Partijos Nr.	Vienetai
Dozavimas butelis 1000 ml su 60 ml matavimo	1000 ml	00-904-010	10x1
Bakelio atidarytuvas	--	00-909-050	10x1
Dozavimo siurblys with 30 ml/paspaudimas	2 L / 5 L / 10 L	00-906-000-01	1x1
Čiaupas 2 l buteliui ir 5, 10 L bakeliui	2 L / 5 L / 10 L	00-907-000	10x1
Dozavimo siurblys 3 ml/paspaudimas	500 ml / 1000	00-906-005-02	1x1
Purškimo galvutė su adapteriu	500 ml / 1000	00-905-010	10x1
Putų purškimo galvutė su adapteriu	500 ml / 1000	00-912-010	10x1
matavimo ąsotis 3 L	3 L	00-906-030	1x1
matavimo indas 40 ml	40 ml	00-906-0004	1x1

Dezinfekcijos vonelės	Dydis	Partijos Nr.	Vienetai
Odontologinių grąžtelių vonelė	100 ml	00-908-001	1x1
1 litro	1 L	00-908-010	1x1
3 litrų	3 L	00-908-030	1x1
4 litrų	4 L	00-908-040	1x1
5 litrų	5 L	00-908-050	1x1
10 litrų	10 L	00-908-100	1x1
Dozavimo įrenginiai	Dydis	Partijos Nr.	Vienetai
DESCOMAT Kompakt skaitmeninis	--	00-904D-KPE	1x1
DESCOMAT Kompakt dvigubas skaitmeninis	--	00-904D-KPD	1x1
Dozavimo kibirėliai 5l	Dydis	Partijos Nr.	Vienetai
DESCO WIPES DT dozavimo kibirėlis tuščias	5 L	00-915-E001	1x1
DESCO WIPES DT dozavimo kibirėlis tuščias	5 L	00-915-E002	6x1
ECO WIPES dozavimo kibirėlis tuščias	5 L	00-915-EEW001	1x1
ECO WIPES dozavimo kibirėlis tuščias	5 L	00-915-EEW002	6x1
blue lid – mėlynas ištraukimo angos dangtelis	--	EIM-OT05BL02	1x1
blue lid – baltas ištraukimo angos dangtelis	--	EIM-OT05BW01	1x1
white lid – mėlynas ištraukimo angos dangtelis	--	EIM-OT05WB01	1x1
white lid – baltas ištraukimo angos dangtelis	--	EIM-OT05WE02	1x1
white lid – žalias ištraukimo angos dangtelis	--	EIM-OT05WGR01	1x1
white lid – raudonas ištraukimo angos dangtelis	--	EIM-OT05WRO01	1x1
white lid – geltonas ištraukimo angos dangtelis	--	EIM-OT05WGE01	1x1
Dispenser buckets 3l	Dydis	Partijos Nr.	Vienetai
DESCO WIPES DT SMALL dozavimo kibirėlis tuščias	3 L	00-915-EK004	1x1
DESCO WIPES DT SMALL dozavimo kibirėlis tuščias	3 L	00-915-EK005	6x1
blue lid – mėlynas ištraukimo angos dangtelis	--	EIM-OT03BL02	1x1
white lid – mėlynas ištraukimo angos dangtelis	--	EIM-OT03WB01	1x1
white lid – baltas ištraukimo angos dangtelis	--	EIM-OT03WE02	1x1
white lid – raudonas ištraukimo angos dangtelis	--	EIM-OT03WRO01	1x1



Dr. Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3
34323 Malsfeld
GERMANY (VOKIETIJA)

Tel.: +49 5664 9496-0
Faksas: +49 5664 8444

Interneto svetainė: www.schumacher-online.com
El. paštas: export@schumacher-online.com

Kitą informaciją, o taip pat saugos duomenų lapus ir mūsų produktų naudojimo instrukcijas galite rasti mūsų interneto svetainėje

www.schumacher-online.com



UAB „GRAINA“

Durpyno g. 22,
LT-36237 Panevėžys
LIETUVA

Tel.: +370 45 570605
Faksas.: +370 45 433540

Mob.: +370 610 67593; +370 612 66824
El. paštas: info@graina.lt

www.graina.lt

